



WARTNER KALKNAGELKWASTJE

Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventueel later gebruik.
- Indien u bijwerkingen opmerkt die niet in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan raadpleeg uw arts.
- Indien u meer informatie nodig heeft of vragen hebt raadpleeg de consumentenservice: 010-221 10 07.

WAT IS WARTNER KALKNAGELKWASTJE?

Wartner Kalknagelkwastje is een medisch hulpmiddel voor de effectieve behandeling van kalk- en schimmelnagels. Lees voor gebruik de hele gebruiksaanwijzing.

De 3in1 formule is niet alleen effectief tegen kalknagels maar vermindert ook verkleuring van de nagels en voorkomt verspreiding van de kalknagel.

De formule dringt door de lagen van de nagel heen en pakt zo de kalknagel bij de bron aan. Wartner Kalknagelkwastje gaat de verdere groei van schimmels tegen en beschermt de nieuwe nagelgroei tegen infectie.

Het Wartner kalknagelkwastje bevat een kleurloze vloeistof in een flesje met een handig kwastje. Het kwastje is makkelijk en precies in gebruik door de speciaal ontwikkelde kwastapplicator die in een handomdraai de gepaste dosering geeft. Een flesje bevat voldoende vloeistof voor de complete behandeling van minimaal 1 nagel.

TOEPASSING

Wartner Kalknagelkwastje wordt gebruikt voor de behandeling van kalknagels en de verbetering van het uiterlijk van de nagel.

HOE WERKT WARTNER KALKNAGELKWASTJE?

Wartner Kalknagelkwastje herstelt het uiterlijk van de aangedane nagel(s) en vermindert verkleuring. Klinische studies met deze formule tonen bij de meeste personen zichtbaar resultaat binnen 2-4 weken*. Indien na 3 maanden nog geen enkel resultaat zichtbaar is, raadpleeg uw arts om eventuele aanvullende behandeling te bespreken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder eventuele nagellak voor u Wartner aanbrengt. Het is niet nodig de nagel te vijlen voor gebruik van Wartner.

Breng Wartner Kalknagelkwastje 1 keer per dag aan op een schone, droge nagel, bij voorkeur voor het slapen gaan:

1. Verwijder de dop.
2. Breng met behulp van het kwastje een dun laagje op de aangedane nagel(s) aan. Vermijd zoveel mogelijk de huid rondom de nagel om huidirritatie te voorkomen.
3. Sluit het flesje goed af met de dop.
4. Nagel(s) enkele minuten laten drogen.

Behandel de kalknagel(s) voor het beste resultaat elke dag totdat de gezonde nagel geheel is terug gegroeid en de gehele nagel er weer gezond uitziet. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de kalknagel. (De uitgroeiperiode van vingernagels is 6-8 maanden, van voetenagels 8-12 maanden). Het product werkt alleen op de nagel en kan daarom gebruikt worden tijdens zwangerschap of borstvoeding. Ervaringen met het gebruik van Wartner Kalknagelkwastje bij kinderen zijn beperkt. Raadpleeg eerst een arts alvorens kinderen te behandelen. Om besmetting te voorkomen dient het kwastje slechts door 1 persoon gebruikt te worden en alleen op kalknagels. Om kalknagels te voorkomen kunt u Wartner ook preventief gebruiken.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Door het gebruik van het product kan in sommige gevallen een lichte irritatie ontstaan van de huid rondom de nagel. Een kalknagel is een verdikte, verkleurde nagel, in sommige gevallen kan de nagel, door infectie, loslaten van het nagelbed.

BEWAARADVIEZEN

Volg onderstaande bewaaradviezen om de kwaliteit en werkzaamheid te helpen behouden:

- Plaats dop stevig op het flesje na gebruik.
- Niet gebruiken na de datum die vermeld staat op flesje en doosje.
- Bewaren bij kamertemperatuur.

Wartner Kalknagelkwastje bevat voldoende vloeistof voor de complete behandeling van minimaal 1 nagel.

INGREDIËNTEN: De formule bevat o.a. ureum en melkzuur.



WAARSCHUWINGEN

Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen om irritatie te voorkomen. In geval van instikken of indien allergische reacties optreden, raadpleeg een arts. Bewaar buiten bereik en buiten het zicht van kinderen. De dop kan verstikking veroorzaken als deze door kinderen wordt ingestikt.

Wartner Kalknagelkwastje is een medisch hulpmiddel.



FABRIKANT:

Pharma Source BV
Reduitleaan 33
4814 DC Breda
The Netherlands

DISTRIBUTEUR:

Omega Pharma Nederland B.V.
Postbus 6612
3002 AP Rotterdam
Consumentenservice: 010- 221 10 07

LAATSTE HERZIENING: april 2019

*77% van de gebruikers ziet binnen 2 weken resultaat, 88% ziet resultaat binnen 4 weken. Test uitgevoerd onder 73 gebruikers.



2797



1423BS.4
900707v3