

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** is een neusspray met een dubbele beschermende werking die snelle verlichting biedt bij hooikoorts, huistofmijt en dierenallergie. De gepatenteerde Nasya™ Technologie van **PREVALIN™ DIRECT PLUS** bevat een combinatie van oliën en emulgatoren, die unieke eigenschappen bezitten. Zo verandert **PREVALIN™ DIRECT PLUS** van een gel in een vloeistof voor makkelijke verstufing. Bij contact van de vloeistof met het neusslijmvlies, wordt opnieuw een ondoordringbare micro-gel barrière voor allergenen gevormd. Wanneer een allergische reactie is veroorzaakt zorgen de micro-gel en natuurlijke oliën in Nasya™ voor mestof stabilisatie, waardoor de gevoeligheid voor allergenen wordt vermindert. Symptomen als niezen, verstopte neus, loopneus of jeukende/brandende ogen worden verlicht. Nasya™ Technologie met klinisch bewezen effectiviteit.

**Prevalin**  
**DIRECT PLUS**



**2 in 1 SNELLE ALLERGIE VERLICHTING**

**BEHANDELT EN BESCHERMT**

**VERMINDERT DE GEVOELIGHEID VOOR ALLERGENEN**

**HOOIKOORTS  
HUISSTOFMIJT &  
DIERENALLERGIE**

**WANNEER PREVALIN™ DIRECT PLUS TE GEBRUIKEN?**

Gebruik **PREVALIN™ DIRECT PLUS** zodra je merkt dat het lichaam reageert op allergenen, voordat de allergische reactie zich volledig ontwikkeld heeft.

Indien de allergische reactie al begonnen is, kan **PREVALIN™ DIRECT PLUS** gebruikt worden in combinatie met **PREVALIN ALLERSTOP CETIRIZINE 10 MG\*** tabletten. **PREVALIN™ DIRECT PLUS** voorkomt verdere blootstelling aan allergenen, die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zodat een nieuwe allergische reactie wordt voorkomen. \*Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

**HOE WERKT PREVALIN™ DIRECT PLUS?**

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** werkt daar waar allergenen een allergische reactie teweegbrengen, op het neusslijmvlies.



**Gel verandert in vloeistof bij schudden.**

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** wordt bij schudden vloeibaar voor makkelijke verstufing. De vloeistof wordt daarna opnieuw een gel op het neusslijmvlies om allergenocontact te blokkeren.

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** heeft een dubbele werking:

**1] BEHANDELT EN BESCHERMT** doordat de micro-gel op 3 niveaus werkt:

1. De gepatenteerde formule schakelt de pollen uit.
2. Bewaart een snelle reiniging van de neus.
3. De fijne nevel vormt een ondoordringbare micro-gel barrière tegen verdere infectie van het neusslijmvlies door pollen.

**2] VERMINDERT DE GEVOELIGHEID VOOR ALLERGENEN** dankzij de micro-gel barrière en natuurlijke oliën, die zorgen voor mestof stabilisatie.



Mestofcellen, ook wel mastocyten genoemd, zijn onderdeel van het menselijk afweersysteem. Na contact met allergenen uit pollen barsten mestofcellen als het ware open. Histamine en andere stoffen die hierbij vrijkomen, veroorzaken de allergische symptomen. De micro-gel met natuurlijke oliën in Prevalin Direct Plus kapselt de mestofcellen in en schakelt de pollen uit. Op deze wijze wordt contact met allergenen voorkomen en blijven de mestofcellen stabiel en intact.

**Waarschuwingen**

Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Dit product bevat sesamol. Gebruik dit product niet als u overgevoelig bent voor sesam- of perilla-olie of andere bestanddelen van Prevalin Direct PLUS. Zeer zeldzame gevallen van allergische reacties zijn gemeld, met symptomen zoals verstopte of lopende neus, lokale pijn, droogheid, jeuk, zwelling, waterige ogen of huiduitslag. In dergelijke gevallen moet het gebruik van het product onmiddellijk worden gestaakt en als de symptomen aanhouden neem dan contact op met een huisarts.

**HOE PREVALIN™ DIRECT PLUS TE GEBRUIKEN?**

Spray 1 tot 2 keer in elk neusgat, 2 tot 3 keer per dag (om de 4 tot 6 uur). Het wordt aangeraden de neus goed te snuiten voor elk gebruik.

Maak de verstuiver na ieder gebruik schoon en droog en plaats de dop terug.



Tijdens het eerste uur van gebruik kan er een licht gevoel van verstopte neus ervaren worden. Dit is een voorbijgaand gevoel, dat snel zal weggaan en volledig zal verdwijnen bij verder gebruik. Verder is het mogelijk dat er irritatie wordt ervaren zodra **PREVALIN™ DIRECT PLUS** is aangebracht. Ook dit zal snel weggaan. Als er ernstige ongemakkelijkheden optreden na gebruik van **PREVALIN™ DIRECT PLUS**, stop dan het gebruik en contacteer een arts. Indien gelijktijdig een andere neusspray gebruikt wordt, moet **PREVALIN™ DIRECT PLUS** opnieuw aangebracht worden zodat de ondoordringbare barrière niet verstoord wordt. Vermijd contact met open vlammen. Maximaal 30 dagen achtereenvolgens te gebruiken. Zodra de klachten terugkomen, kan de behandeling worden herhaald.

**HOE WORDT PREVALIN™ DIRECT PLUS BEWAARD?**

Bewaren op een koele, droge plaats. Bewaar niet boven 27°C. Niet bewaren in de koelkast of diepvries, omdat lagere temperaturen de druppelgrootte en spray formule aantasten. Na openen binnen 90 dagen gebruiken. Gebruik niet na de vervaldatum. Buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaren.

**Ingrediënten:** Bertoniet weegum, zandhaargom, glycerolmonostearaat, kaliumfosfaat, dikaliumfosfaat, glycerine, sesamzaadolie (sesam), perillazaadolie, muntolie, gemengde tocopherolen, water, conserveermiddelen (benzoyethanol, caprylyl glycol, kaliumsorbaat).

**GOED OM TE WETEN**

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** is medisch hulpmiddel. Het bevat geen geneesmiddelen (zoals antihistaminica en corticosteroïden). Geschikt voor atleten en tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding.

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** kan gebruikt worden in combinatie met geneesmiddelen.

De gepatenteerde formule bevat geen alcohol.

**PREVALIN™ DIRECT PLUS** veroorzaakt geen slaperigheid en is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Het gebruik van **PREVALIN™ DIRECT PLUS** tast de werking van medicijnen, antihistaminica tabletten of andere vormen van allergie-behandelingen niet aan.

Dr. Kleine Pharma GmbH, Opalestrasse 1, 33739 Bielefeld, Duitsland  
Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3302 AP Rotterdam

Voor het laatst herzien in maart 2019



www.prevalin.nl

LF106440\_349\_REV01 / 2019.03