





FR
<div>MILEX<div> <div> <div>à CooperSurgical Brand</div> </div> </div> </div>
Pessaire GEHRUNG pliable
Soutien efficace en cas de cystocèle RxOnly
<p>MODÈLES DISPONIBLES</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>GEHRUNG</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">REF</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXPGS (Pessaire uniquement)</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXKPGS (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>GEHRUNG avec BOUTON</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">REF</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXPGSK (Pessaire uniquement)</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXKPGSK (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  CE0086 </div> <p>Utilisation à usage unique (une seule patiente)</p> <p>Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.</p> <p>DESCRIPTION</p> <p>Le Pessaire GEHRUNG Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.</p> <p>MISES EN GARDE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le pessaire GEHRUNG avec ou sans le BOUTON contient une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM. Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone. Les substances chimiques présentes dans diverses préparations vaginales peuvent interagir avec le matériau du pessaire et entraîner sa décoloration ou sa détérioration. Le TRIMO-SAN™ n'interagit pas avec le matériau du pessaire. Utiliser exclusivement du TRIMO-SAN. La compatibilité des autres matériaux n'a pas été testée. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

--

--

SV

<div>MILEX<div> <div> <div>à CooperSurgical Brand</div> </div> </div> </div>
GEHRUNG vikbar livmoderring
För effektivt stöd vid cystocelé RxOnly

<p>TILLGÅNGLIGA MODELLER</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>GEHRUNG</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">REF</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXPGS (Endast livmodering)</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXKPGS (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>GEHRUNG med KNOPP</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">REF</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXPGSK (Endast livmodering)</div> <div style="font-size: 8px; margin-right: 5px;">MXKPGSK (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  CE0086 </div> <p>Ska endast användas av en och samma patient</p> <p>Rengör livmoderringen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.</p> <p>BESKRIVNING</p> <p>Milex® GEHRUNG livmodering är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.</p> <p>VARNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> GEHRUNG livmodering med eller utan KNOPP innehåller en trådspole som måste avlägsnas före röntgen eller magnetisk resonanstomografi. Använd inte en livmodering under en längre tid, då det kan uppstå allvarliga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp. Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderingar. Kemikalierna i olika vaginalpreparat kan reagera med materialet i livmoderringen och leda till missfärgning eller nedbrytning av denna. TRIMO-SAN™ reagerar inte med materialet i livmoderringen. Använd endast TRIMO-SAN. Andra material har inte testats för kompatibilitet. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Soutien efficace en cas de cystocèle. Il peut aussi être modélé manuellement pour réduire une rectocèle. Le pessaire GEHRUNG est plus facilement adaptable dans les cas où une cystocèle a tendance à glisser lors de l'utilisation d'autres pessaires.

- Il est soutenu par les restes du releveur anal, latéralement. Ceci évite la pression sur le rectum, qui, en particulier chez les patientes âgées, entrave parfois le transit intestinal.

- Le pessaire GEHRUNG fournit également un soutien large sous la vessie et évite la descente de l'utérus. Il n'interfère pas avec les douches vaginales ou le coït. Le pessaire GEHRUNG avec BOUTON stabilise la jonction urétéro-vésicale.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PESSAIRE DESTINÉES À LA PATIENTE

IMPORTANT
COOPERSURGICAL CONSEILLE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PESSAIRES PAR LE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES.

- Pour garantir la bonne prise en charge de votre problème, votre professionnel de santé a besoin de votre pleine coopération.
- Il est essentiel que votre professionnel de santé examine votre vagin à intervalles réguliers pour vérifier l'absence de pression et de réaction allergique.
- Une augmentation graduelle de l'intervalle d'examen peut être envisagée à la discrétion du médecin.
- Il est important d'évaluer les effets du gel vaginal TRIMO-SAN.

LES SYMPTÔMES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉS À VOTRE MÉDECIN :

- Difficultés pour uriner
- Inconfort
- Modification de la couleur ou de la consistance des pertes vaginales
- Augmentation de la quantité de pertes vaginales ou des saignements vaginaux
- Pertes vaginales malodorantes
- Démangeaisons au niveau du vagin
- Sortie du pessaire

Pour les urgences médicales et pour tout avis médical, consulter votre professionnel de santé.

POUR LE MÉDECIN / LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Passer ces instructions en revue avec la patiente pour établir le mode d'utilisation.

INSTRUCTIONS

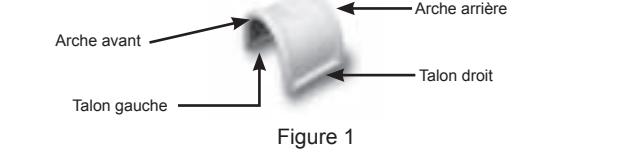


Figure 1

--

PATIENTANVISNINGAR VID ANVÄNDNING AV LIVMODERRING

FÖRSIKTIGHET

COOPERSURGICAL REKOMMENDERAR ATT LIVMODERRINGEN INPASSAS AV LÄKARE ELLER ANNAN HÄLSOVÅRDSPERSONAL, SAVIDA INGET ANNAT ANGES.

- Vårdgivaren behöver ditt samarbete för att säkerställa önskad korrigering av ditt tillstånd.
- Det är viktigt att vårdgivaren regelbundet undersöker ditt underliv för tecken på tryck från ringen och/eller allergiska reaktioner.
- Undersökningarna intervall kan gradvis ökas om behandlande läkare finner det lämpligt.
- Det är viktigt att utvärdera effekterna av TRIMO-SAN vaginalgel.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--