




beurer

BY 90



NL Babyweegschaal
Gebruiksaanwijzing

CE

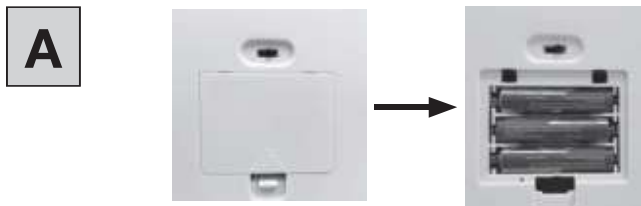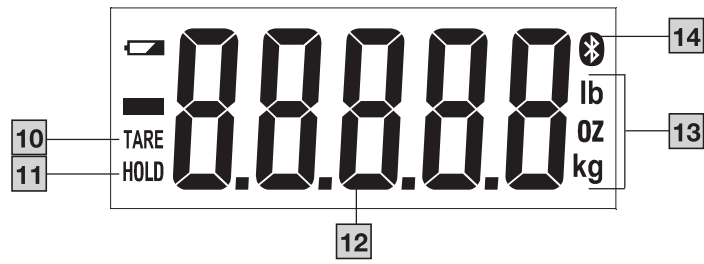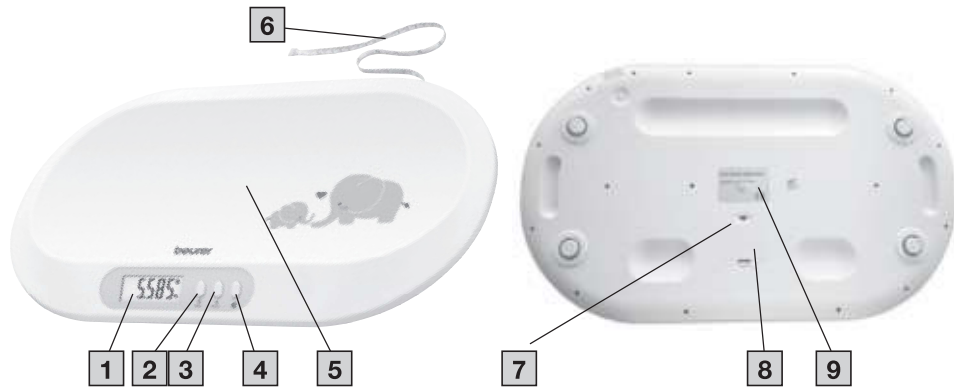

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering.....	3	7. Gebruik.....	6
2. Verklaring van de symbolen	3	8. Reiniging en onderhoud	6
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	3	9. Wat te doen bij problemen	6
4. Voorgeschreven gebruik.....	4	10. Verwijdering.....	7
5. Beschrijving van het apparaat.....	4	11. Technische gegevens	7
6. Ingebruikname.....	4	12. Garantie.....	7

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Beknopte handleiding
- Babyweegschaal BY 90
- 3 AAA-batterijen van 1,5V (GLR03A)
- Deze gebruiksaanwijzing

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING
Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan het de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.	
	VOORZICHTIG
Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan het lichte of geringe verwondingen tot gevolg hebben.	
	LET OP
Duidt op een mogelijk schadelijke situatie. Indien deze niet vermeden wordt, kan de apparatuur of iets in de omgeving daarvan beschadigd raken.	
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Instructie lezen
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton

	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Gelijkstroom Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom.
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Importersymbol

3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDS-RICHTLIJNEN

WAARSCHUWING

Veiligheidsrichtlijnen

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking).
- Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Bewaar de batterijen en de weegschaal buiten bereik van kleine kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts als er een batterij is ingeslikt.
- Stel de babyweegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice van Beurer of door geautoriseerde verkopers worden uitgevoerd.
- Druk niet met geweld of met spijte voorwerpen op de toets.

VOORZICHTIG

- Plaats geen voorwerpen op de weegschaal als deze niet wordt gebruikt.

- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan negatief worden beïnvloed door sterke elektromagnetische velden (bijv. inductiekookplaat, mobiele telefoons).
- Verwijder de eventueel aanwezige transportbeveiliging.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- De maximale belasting van de weegschaal is 20 kg (44 lb, 705 oz). Bij de gewichtsmeting worden de resultaten in stappen van 5 g (0,01 lb, 0,18 oz) weergegeven.
- Wanneer er sprake is van verschillende meetresultaten (op de weegschaal en in de app) dienen uitsluitend de op de weegschaal weergegeven meetwaarden gebruikt te worden.
- Bij levering is de weegschaal ingesteld op de eenheid "kg".

Veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot het gebruik van batterijen

- Plaats batterijen altijd op de juiste wijze en let daarbij op de juiste polariteit (+/-). Houd batterijen schoon en droog en uit de buurt van water. Kies altijd het juiste type batterij.
- Voorkom kortsluiting van de batterijen en van de contacten van het batterijvak.
- Laad batterijen nooit op, ontlad ze niet geforceerd, verhit ze niet, haal ze niet uit elkaar, vervorm ze niet, kapsel ze niet in en pas ze ook niet aan.
- Voer nooit las- of soldeerwerkzaamheden uit bij batterijen.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende fabrikanten, met verschillende capaciteiten (nieuw en gebruikt) of van verschillende formaten of verschillende types door elkaar in één apparaat.
- **Explosiegevaar!** Wanneer de genoemde punten niet in acht worden genomen, kan dit persoonlijk letsel, oververhitting, lekkages, ontluchting, een breuk, een explosie of brand tot gevolg hebben.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u beschermende handschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- **Gevaar voor inslikken!** Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen. Roep bij inslikken onmiddellijk de hulp van een arts in.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene batterijen vervangen.
- Bewaar batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen, in een goed geventileerde, droge en koele ruimte.
- Stel batterijen nooit bloot aan direct zonlicht of regen.
- Haal batterijen uit het apparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Voer lege batterijen meteen volgens de voorschriften af. Gooi batterijen nooit weg in vuur.
- Bewaar batterijen met verschillende elektrochemische systemen gescheiden van elkaar bij het afvoeren.
- **LET OP!** Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat de productveiligheid kan schaden.
- Het weggooien van een accu in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Stel een batterij niet bloot aan hoge of lage extreme temperaturen of lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.

4. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

De babyweegschaal is uitsluitend bestemd voor het bepalen van het gewicht van baby's en kleine kinderen. De babyweegschaal is geen medisch apparaat. De babyweegschaal is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik of gebruik in de medische sector. De babyweegschaal mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

- | | |
|---|--|
| 1 Display | 2 AAN-/UIT-/TARRA-toets  |
| 3 HOLD-toets  | 4 Bluetooth®-toets  |
| 5 Weegschaaloppervlak | 6 Uittrekbaar meetlint |
| 7 Regelaar voor de eenheden | 8 Batterijvak met afdekking |
| 9 Typeplaatje | |

Display

- | | |
|--|--|
| 10 "TARE" (tarrafunctie actief) | 11 "HOLD" (vastzetfunctie actief) |
| 12 Gewichtswaardeweergave | 13 Gewichtseenheid (kg, oz of lb) |
| 14 Bluetooth®-symbool (Bluetooth® is geactiveerd) | |

Gewichtseenheid selecteren

Bij levering is de babyweegschaal ingesteld op de gewichtseenheid kilogram "kg". Op de achterzijde van de babyweegschaal vindt u een regelaar voor de eenheden, waarmee u de gewichtseenheid naar keuze ook op pond "lb" of ounce "oz" kunt zetten.


6. INGEBRUIKNAME

Batterijen plaatsen

Voordat u de babyweegschaal in gebruik kunt nemen, moet u eerst drie AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V in het batterijvak van de babyweegschaal plaatsen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Open de afdekking van het batterijvak aan de onderzijde van de babyweegschaal.
2. Plaats drie AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V in het batterijvak. Let goed op dat de batterijen met de juiste polariteit (+/-) worden geplaatst, zoals weergegeven in het batterijvak.
3. Sluit de afdekking van het batterijvak. Het vak is gesloten, zodra de afdekking hoor- en merkbaar vastklikt.

-  Als "Lo" op het display wordt weergegeven, moet u de batterijen vervangen.

Ingebruikname met app

Met de "beurer BabyCare"-app kunt u de gemeten gewichtswaarden via Bluetooth® overdragen naar uw smartphone.

Om ervoor te zorgen dat de Bluetooth®-verbinding tijdens de ingebruikname actief blijft, moet u met de smartphone in de buurt van de weegschaal blijven.

Voer de volgende stappen uit om de babyweegschaal met de smartphone te verbinden:

1. Activeer Bluetooth® in de instellingen van de smartphone.
2. Download de gratis "beurer BabyCare"-app in de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android™).

- Open de "beurer BabyCare"-app en volg de instructies op.
- Voer de gebruikersgegevens in. De volgende instellingen moeten in de "beurer BabyCare"-app geconfigureerd zijn of worden:

Gebruikersgegevens	Instelwaarden
Geboortedatum	DAG, MAAND, JAAR

- Plaats de batterijen en zet de babyweegschaal op een vaste ondergrond (op het display van de weegschaal knippert "app").
- De babyweegschaal wordt 120 seconden in de app weergegeven en kan verbonden worden.

i als u de babyweegschaal bij de eerste ingebruikname nog niet met de app hebt verbonden, knippert "APP" 10 seconden bij het opnieuw inschakelen van de weegschaal. Pas nadat de weegschaal met de app is gesynchroniseerd, wordt deze melding niet meer weergegeven.

- De babyweegschaal is met de app verbonden, zodra het *Bluetooth*[®]-symbool **B** op het display wordt weergegeven.
- Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.
- Deze babyweegschaal heeft de functie "HOLD" (AUTO HOLD en MECHANICAL HOLD). De standaard geactiveerde AUTO HOLD-functie zet het gewicht van de baby vast, zodra deze stil genoeg ligt om een nauwkeurige meetwaarde vast te stellen. Als de baby veel beweegt, kan er geen gewicht worden bepaald. Probeer de trappelende baby daarom te kalmeren om het gewicht snel te kunnen meten. Raak de baby echter niet aan, want dit beïnvloedt de gewichtsmeting. Zodra het gewicht van de baby is vastgesteld, stopt de melding "HOLD" met knipperen en wordt het gewicht gedurende 120 seconden weergegeven.

i als het gewicht na 8 seconden niet automatisch kan worden vastgesteld, berekent de babyweegschaal 4 seconden lang het gemiddelde van het gewicht (knipperende weergave van het gewicht op het display van de babyweegschaal).

- Het gewicht wordt op de babyweegschaal opgeslagen en de weegschaal wordt na 120 seconden automatisch uitgeschakeld. Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** 3 seconden ingedrukt om de weegschaal handmatig uit te schakelen.
- Als de baby erg veel trappelt, kunt u de functie MECHANICAL HOLD selecteren door op de HOLD-toets te drukken. De melding "HOLD" stopt binnen 5 seconden met knipperen en het gewicht wordt gedurende 120 seconden weergegeven.
- Druk na de meting op de *Bluetooth*[®]-toets **B** om het gemeten gewicht over te dragen naar de app.
- Na de overdracht wordt de babyweegschaal automatisch uitgeschakeld.

Ingebruikname zonder app

Wij adviseren u de ingebruikname en de configuratie van alle instellingen in de "beurer BabyCare"-app uit te voeren (zie hoofdstuk "Ingebruikname met app").

i meetresultaten die zonder voorafgaande synchronisatie op de babyweegschaal zijn opgeslagen, kunnen niet worden overgedragen.

- Plaats de babyweegschaal op een vlakke, vaste ondergrond; dit is de voorwaarde voor een correcte meting.
- Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** om de babyweegschaal in te schakelen. Op het display knippert "APP" 120 seconden. Druk op een willekeurige toets om de weegschaal zonder app te gebruiken.
- Zodra "0,000 kg" op het display wordt weergegeven, is de babyweegschaal klaar voor de meting.

- Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.
- Het gewicht wordt 120 seconden weergegeven, daarna wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** om een nieuwe meting uit te voeren. Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** 3 seconden ingedrukt om de weegschaal handmatig uit te schakelen.

Latere synchronisatie met de app

Als u de babyweegschaal bij de eerste ingebruikname niet met de "beurer BabyCare"-app hebt gesynchroniseerd, kunt u dit ook later doen.

- Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** om de babyweegschaal in te schakelen.
- Op het display van de babyweegschaal knippert "APP" 10 seconden. Als de app geopend is, wordt de babyweegschaal gedurende deze eerste 10 seconden weergegeven. De weegschaal kan dan worden verbonden.

Alternatief:

Druk als de weegschaal in gebruik is op de *Bluetooth*[®]-toets **B**. Als de app geopend is, wordt de babyweegschaal 120 seconden weergegeven. De weegschaal kan dan worden verbonden.

- De babyweegschaal is met de app verbonden zodra het *Bluetooth*[®]-symbool **B** op het display wordt weergegeven.

Meetresultaten overdragen

Er kunnen maximaal 10 metingen worden opgeslagen.

- Druk op de *Bluetooth*[®]-toets **B**. **B** begint op het display te knipperen (120 seconden) tot de app is geopend. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **B** continu op het display weergegeven totdat de gegevens zijn overgedragen. Na de overdracht van de meetresultaten wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld.

AUTO HOLD-functie deactiveren

Als u de babyweegschaal zonder AUTO HOLD-functie wilt gebruiken, kunt u de AUTO HOLD-functie deactiveren.

- Zodra "0,000 kg" op het display wordt weergegeven, kan de AUTO HOLD-functie worden gedeactiveerd door de HOLD-toets 3 seconden ingedrukt te houden.
- Zodra "0,000 kg" op het display wordt weergegeven, is de babyweegschaal klaar voor de meting.
- Leg nu de baby op het weegschaaloppervlak. Ga hierbij zeer voorzichtig te werk; laat de baby niet vallen en let op het hoofdje van de baby.
- Druk op de HOLD-toets om het gewicht van de baby vast te zetten. Het gewicht wordt binnen 5 seconden vastgezet.
- Het gewicht wordt 120 seconden weergegeven, daarna wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. Druk op de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** om een nieuwe meting uit te voeren. Houd de AAN-/UIT-/TARRA-toets **1** 3 seconden ingedrukt om de babyweegschaal handmatig uit te schakelen.
- Zodra "0,000 kg" op het display wordt weergegeven, kan de AUTO HOLD-functie weer worden geactiveerd door de HOLD-toets 3 seconden ingedrukt te houden.

i de AUTO HOLD-functie is geactiveerd zodra het HOLD-symbool + ON op het display wordt weergegeven.

Tarrafunctie

Als u de baby niet direct op het weegschaaloppervlak wilt leggen, maar bijvoorbeeld op een handdoek, dan moet u de handdoek al op de babyweegschaal leggen, voordat u deze inschakelt. Als u een handdoek of andere gewichten op de reeds ingeschakelde weegschaal legt en u wilt deze voor het wegen weer van het gewicht aftrekken, kunt u ook de tarrafunctie gebruiken. Nadat u op de TARRA-toets hebt gedrukt, wordt "TARE" op het display weergegeven. Als u de weegschaal weer terug wilt zetten

op “0,000 kg”, moet u de handdoek of het extra gewicht van de weegschaal halen en opnieuw op de TARRA-toets drukken.

Meetlint gebruiken


Als u de baby wilt meten, trekt u het meetlint aan de bovenzijde van de babyweegschaal uit. Om het meetlint weer in de babyweegschaal op te rollen, drukt u aan de onderzijde van de babyweegschaal op de ronde toets naast het meetlint. U kunt de lengte en de hoofdomvang van uw baby handmatig in de “beurer BabyCare”-app invoeren.

7. GEBRUIK

Meetwaarden op de babyweegschaal opslaan en naar de app overdragen

Op de babyweegschaal kunnen maximaal 10 metingen worden opgeslagen. De opgeslagen meetwaarden worden automatisch naar de app overgedragen als u de app binnen het Bluetooth®-bereik opent en Bluetooth® op de weegschaal is ingeschakeld. Het niet mogelijk om gegevens automatisch over te dragen als de babyweegschaal is uitgeschakeld.

Weegschaalgegevens wissen

Houd de Bluetooth®-toets  5 seconden ingedrukt om alle metingen op de babyweegschaal volledig te wissen.

Batterijen vervangen

Uw weegschaal geeft aan wanneer de batterijen moeten worden vervangen. Wanneer u de weegschaal gebruikt met bijna lege batterijen, wordt op het display “Lo” weergegeven en wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. In dat geval moeten de batterijen worden vervangen (3 x AAA, 1,5 V). Alle opgeslagen metingen blijven opgeslagen.

- Na het vervangen van de batterijen moet u de babyweegschaal opnieuw met de app synchroniseren (zie hoofdstuk “Ingebruikname met app”).
- Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type, hetzelfde merk en dezelfde capaciteit wanneer u de batterijen vervangt.
- Gebruik geen oplaadbare accu's.
- Gebruik geen batterijen die zware metalen bevatten.



8. REINIGING EN ONDERHOUD

De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van de zorgvuldige hantering van het apparaat:

De babyweegschaal moet van tijd tot tijd worden schoongemaakt.

U kunt het apparaat schoonmaken met een vochtige doek, waarop u indien gewenst ook een beetje afwasmiddel kunt aanbrengen.

VOORZICHTIG

- Gebruik nooit sterke oplos- en reinigingsmiddelen.
- Dompel de babyweegschaal niet onder in water!
- Spoel de babyweegschaal niet af onder stromend water.
- Reinig de babyweegschaal niet in de vaatwasmachine!

Opbergen

Als u de babyweegschaal langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u deze in de originele verpakking in een droge omgeving op te bergen. Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op de babyweegschaal. Bewaar de babyweegschaal buiten bereik van kinderen en huisdieren. Verwijder de batterijen uit de babyweegschaal.

9. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Display-weergave	Oorzaak	Oplossing
Err	Geen vlakke, stevige ondergrond.	Plaats de babyweegschaal op een vlakke ondergrond (geen tapijt). Tarreer de babyweegschaal opnieuw.
	Het maximale draagvermogen van 20 kg is overschreden.	Belast de weegschaal niet met meer dan 20 kg.
Er wordt een onjuist gewicht weergegeven.	Geen vlakke, stevige ondergrond.	Plaats de babyweegschaal op een vlakke ondergrond (geen tapijt). Tarreer de babyweegschaal opnieuw.
Er wordt een onjuist gewicht weergegeven.	De baby trappelt te veel.	Probeer de baby rustig te krijgen zodat hij niet meer trappelt.
Er wordt een onjuist gewicht weergegeven.	Het nulpunt van de weegschaal is onjuist.	Schakel de babyweegschaal uit en weer in. Wacht tot de babyweegschaal “0.000 kg” weergeeft en voer de meting opnieuw uit.
Geen Bluetooth®-verbinding ( -symbool ontbreekt).	Apparaat buiten het bereik.	Het minimumbereik in een open ruimte bedraagt ongeveer 15 m. Muren en plafonds verminderen het bereik. Andere radiogolven kunnen de overdracht storen. Plaats de babyweegschaal daarom niet in de buurt van apparaten zoals WLAN-routers, magnetrons en inductiekookplaten.
	Bluetooth® is uitgeschakeld op de weegschaal.	Druk op de Bluetooth®-toets  tot  op het display gaat branden.
	Geen verbinding met de app.	Sluit de app volledig af (ook op de achtergrond). Schakel Bluetooth® uit en weer in. Schakel de smartphone uit en weer in. Haal de batterijen kort uit de babyweegschaal en plaats ze vervolgens weer terug. Zie de FAQ op www.beurer.com .
Lo	De batterijen van de weegschaal zijn leeg.	Vervang de batterijen van de babyweegschaal.
RPP	De babyweegschaal is niet met de app gesynchroniseerd. Alle metingen die zonder voorafgaande synchronisatie van de babyweegschaal met de app zijn uitgevoerd, kunnen niet worden overgedragen.	Verbind de babyweegschaal met de app (zie hoofdstuk “Ingebruikname met app”).

10. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



Batterijen verwijderen

Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen. Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik



11. TECHNISCHE GEGEVENS

Model	BY 90
Afmetingen	560 x 330 x 47,5 mm
Gewicht	1,35 kg (zonder batterijen)
Spanning	max. 4.5 V
Bedrijfstemperatuur	max. 40 °C
Nominale stroom	15 mA
Batterijen weegschaal	3 AAA-batterijen van 1,5 V
Meetbereik	0,050 kg - 20 kg (0,11 lb - 44 lb, 1,76 oz - 705 oz)
Meetgeheugen	10 metingen
Gegevensoverdracht via Bluetooth® low energy technology	Het product maakt gebruik van Bluetooth® low energy technology Frequentieband 2400 MHz – 2480 MHz Zendvermogen max. 8,0 dBm
Systeemvereisten en compatibele apparaten voor de app „beurer BabyCare“	

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU.

De CE-conformiteitsverklaring van dit product vindt u op: www.beurer.com/conformity

12. GARANTIE

Meer informatie over de garantie en de garantievooraarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Android is a trademark of Google LLC.

Fouten en wijzigingen voorbehouden

956.06_BY90_2025-05-28_07_IM2_BEU_NL



Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

