

HANDLEIDING QUIKTOOL OORTHERMOMETER BESCHERMKAPJES

Bewaaradvies:

Bewaar de beschermkapjes in originele verpakking, buiten bereik van kinderen

Gebruik:

1. Verwijder het eventuele gebruikte beschermkapje van uw oorthermometer
2. Open de verpakking, en plaats de lens van uw oorthermometer in het eerst beschikbare beschermkapje.
3. Druk lichtjes aan tot het beschermkapje om uw lens blijft zitten
4. Verwijder de lens uit de doos, samen met het nieuwe beschermkapje
5. Na gebruik beschermkapje weggooiden

Veiligheidsadvies:

- **Bewaren buiten bereik van kinderen**
- **Uitsluitend te gebruiken in combinatie met bij horende oorthermometer**
- **Gebruik uw thermometer zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing**