

SCOOTPLAZA.NL

Contactgegevens

Scootplaza
Euroweg 25
3825HA
Amersfoort
Nederland

Gebruiksaanwijzing rolstoel PLAZA PL1



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Verklaring van overeenstemming	3
Hergebruik	3
Garantie	3
Onderdelen van de rolstoel	4
Typeplaatje	4
Indicatie / contra – indicatie voor gebruik	5 /6 /7
Installatie instructies	7
In gebruik nemen van de stoel	8
Bedienen van de remmen	9
Armsteun	9
Het opklappen of verwijderen van de beensteunen	9
Het opvouwen van de rolstoel	10
Reiniging en onderhoud	10
Transport en opbergen	11
Garantie en onderhoudsschema	11
Technische specificatie	12

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Scootplaza. Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van deze rolstoel heeft een hoge kwaliteit.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot Scootplaza.nl of speciaalzaak die u het product heeft geleverd. Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen. Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, dit moet door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

Scootplaza.nl verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 20

17/745.

Levensduur Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd. Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden. Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker. Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden. Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Verkrijgbare accessoires vindt u op www.scootplaza.nl

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen. Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout. Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen, handgrepen en armsteunen

Laat uw rolstoel jaarlijks door u dealer controleren tijdens de service beurt.

Onderdelen van de rolstoel:

- 1: Handvaten
- 2: Frame
- 3: Armleggers
- 4: Rug
- 5: Zit
- 6: Remmen
- 7: Voetsteun
- 8: Kruis
- 9: Voetplaten
- 10: Aandrijfwielen
- 11: Stuurwielen



Typeplaatje

Product: Rolstoel	Product model: PLAZA PL1
Serienummer: .	Zitruimte: 45 cm
Max. gebruiksgewicht: 111 kg	Gebruiksprijs: 3 jaar
	
 INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD	
Add.: LAI FUM BLD, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, CHINA	
Zip code: 999077 Tel: (86 5) 1 831 74088	
 EU-REP: Scootplaza B.V.	Import:
Adres: Euroweg 25, 3825HA Amersfoort, Nederland - scootplaza.nl	
File No.: YK-CE-02-B, Rev. A/0	

1 2 3 4 5 9 6 7 8 1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Indicatie | contra-indicatie voor gebruik rolstoel

INDICATIE:

Verlies van loopvermogen of sterk verminderd loopvermogen en toch een essentiële behoefte om zich in het eigen huis te verplaatsen en het huis te verlaten voor een korte wandeling in de frisse buitenlucht of om plaatsen meestal dicht bij huis te bereiken voor alledaagse inkopen of bezigheden. De rolstoel dient uitsluitend voor individueel gebruik door mensen met een verminderd of weggefallen loopvermogen, die zich hiermee zelf kunnen voortbewegen of zich door anderen kunnen laten duwen bij dagelijks gebruik, zowel binnenshuis als buitenshuis, op een stevige, horizontale ondergrond. Let bij de levering bovendien op lichaamslengte, gewicht, fysieke en psychische gesteldheid, leeftijd, woonomstandigheden en omgeving.

CONTRA-INDICATIE:

Het gebruik van deze rolstoel is niet geschikt bij:

- een beperkt gezichtsvermogen
- sterke evenwichtsstoornissen
- verlies van ledematen aan beide armen
- gewrichtscontracturen / beschadigde gewrichten aan beide armen
- onvermogen om te zitten.

Let op! Gevaar voor letsel!

Gebruik de rolstoel nooit als douchestoel.

Veiligheidsinstructies

Voor een correcte en veilige bediening verzoeken wij u de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht te nemen: Stabiliteit en evenwicht Uw rolstoel is zo ontworpen, dat deze de stabiliteit biedt die u bij normale dagelijkse activiteiten nodig hebt. Iedere beweging die u in de rolstoel maakt, is van invloed op het zwaartepunt, wat in het ongunstigste geval tot kantelen van de rolstoel kan leiden. Voor extra veiligheid raden wij u aan, veiligheidsgordels te gebruiken. Vanuit de stoel naar een voorwerp reiken De grenzen van het evenwicht om een voorwerp te bereiken zijn vastgesteld met onderzoeken onder een representatieve groep rolstoelgebruikers. Alleen de armen kunnen buiten de zitting van de rolstoel worden uitgestoken. De romp en het hoofd moeten binnen de grenzen van de zitting blijven.

Leun niet naar voren.

Leun met uw borstkas niet over de armleuningen. Als u een voorwerp wilt bereiken dat zich vóór u bevindt, moet u voorover leunen en omlaag buigen. Daarom moet u de zwenkwielen gebruiken als hulpmiddelen (door deze naar voren te richten) om uw stabiliteit en evenwicht te bewaren. Het zorgvuldig richten van de wielen is essentieel voor uw veiligheid. Leun niet naar achteren. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij het gewenste voorwerp, zodat u er gemakkelijk bij kunt door uw arm uit te strekken terwijl u in een normale houding in de stoel blijft zitten. Leun in geen geval te ver naar achteren, want dan zou de stoel kunnen kantelen. Zijwaartse verplaatsing. U kunt zelfstandig ergens anders gaan zitten als u beschikt over voldoende lenigheid en spierkracht. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats waar u wilt gaan zitten en zorg dat de zwenkwielen naar voren zijn gericht. Zet de parkeerremmen van de achterwielen vast. Gebruik indien mogelijk een plank om van de ene naar de andere zitplaats te gaan. Verplaatsing naar voren. Als u in staat bent op te staan, kunt u naar voren gaan om op een andere plaats te gaan zitten. Als deze beweging voor u moeilijk is, is ondersteuning van een begeleider of een verpleger aanbevolen voor een zo eenvoudig en veilig mogelijke verplaatsing. Zet de beide remmen vast en zorg ervoor dat de beide zwenkwielen naar voren zijn gericht. Let er daarbij op dat u bij uw verplaatsing in geen geval op de remmen mag leunen. Pak dan de greep van de armleuningen stevig vast, steun op uw armen om u een beetje op te richten, en vervolgens kan uw begeleider u helpen bij de voltooiing van uw verplaatsing. Plaats uzelf zo dicht mogelijk bij de plaats waar u wilt gaan zitten. Ga bij uw verplaatsing zo ver mogelijk naar achteren op de zitting van uw rolstoel zitten om te voorkomen dat het zitkussen beschadigd raakt of dat de rolstoel naar voren kantelt. Zet de twee remmen vast. De remgrepen mogen in geen geval worden gebruikt voor ondersteuning bij het in of uitstappen van de rolstoel. Steun nooit op de voetenplanken wanneer u uit de rolstoel opstaat. Als u in staat bent om te staan en als uw bovenlichaam sterk en lenig genoeg is, kunt u zelf naar voren buigen en u naar de andere zitplaats verplaatsen. Vouw de voetenplank op en draai de voetsteun/beensteun opzij om de weg vrij te maken. Buig uw lichaam naar voren terwijl u op de twee armleuningen steunt en richt u op. Vervolgens schuift u uw lichaam in de richting van de plaats waar u wilt zitten terwijl u uw gewicht verdeelt over uw armen en handen.

Hindernissen overwinnen met een begeleider

Zo komt u op de stoep

Uw begeleider plaatst de rolstoel vooruit rijdend voor de stoep. Hij/zij kantelt de rolstoel naar achteren tot de zwenkwielen het voetpad bereiken, duwt de rolstoel naar voren totdat de achterwielen tegen de stoeprand staan en duwt de rolstoel verder tot de achterwielen over de stoeprand rijden.

Van de stoep afrijden

Uw begeleider plaatst de rolstoel voorwaarts met de zwenkwielen aan de stoeprand en kantelt de rolstoel naar achteren naar zich toe. Vervolgens duwt hij/zij de rolstoel voorzichtig naar voren, tot de achterwielen de weg raken, daarna laat hij/zij de zwenkwielen weer rustig op de grond komen.

Trappen overwinnen

Omdat het overwinnen van trappen moeilijk is, wordt inzet van twee begeleiders aanbevolen: één begeleider voor de rolstoel en één erachter bij de duwgrepen. De begeleider die achter de rolstoel staat, kantelt de rolstoel naar achteren naar zich toe, waarbij hij de duwgrepen stevig vasthoudt. De begeleider aan de voorkant van de rolstoel houdt de zijframes aan de voorkant stevig vast en tilt de stoel over de treden, terwijl de andere begeleider één voet op de volgende trede plaatst en de eerste beweging herhaalt. Laat de zwenkwielen van de rolstoel niet zakken voordat de begeleider aan de voorkant van de rolstoel de laatste trede heeft beklommen. De trap afdalen gaat op dezelfde wijze, maar dan in omgekeerde volgorde.

Hellingen afrijden

Buig uw bovenlichaam naar achteren en stuur via de hoepels, die door uw handen glijden, de snelheid en richting. Vermijd plotselinge veranderingen van richting en probeer nooit een helling diagonaal op of af te rijden. Probeer de rolstoel ook niet tijdens het oprijden te draaien. De rolstoel is niet geschikt als stoel waarin u een auto bestuurt. Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.

Installatie instructies

Installatie en ingebruikname van de rolstoel

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de gevaren bij onkundig gebruik. Bij twijfel neem direct contact op met uw leverancier. Twijfelt u instaat bent om in de rolstoel te rijden. Neem contact op met uw behandelaar zoals uw huisarts.

De rolstoel zit gemonteerd in de doos. De onderdelen die u zelf moet bevestigen zijn de beensteunen. Deze moeten ook op de juiste hoogte worden ingesteld. Dit gebeurt in de regel bij de aflevering van de rolstoel door uw dealer.

Inhoud van de doos:

1 x rolstoel opgevouwen

1 set beensteunen

1 x gebruiksaanwijzing

Maximaal gebruikers gewicht is 114 Kg voor deze rolstoel.

Overschrijd deze niet.

Let op! Kans op gevaar.

Loop niet sneller dan 5 km/h met de rolstoel.

In gebruik nemen van de rolstoel

Hier zijn twee eenvoudige stappen om rolstoelen gebruiksklaar te maken:

Stap 1: uitvouwen Houd het frame met beide handen vast, zodat het linker- en rechterframe enigszins gescheiden zijn. Wanneer de twee zijden van het zitkussen met de hand lichtjes ter hoogte van het zitkussen naar beneden worden gedrukt, wordt de rolstoel opgevouwen. (Zie Afbeelding 1)

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Opmerking: trek bij het uitklappen niet te hard aan het linker en rechter frame om de onderdelen niet te beschadigen. Wanneer u het zitkussen naar beneden drukt, mag u de vinger niet tegen de zitbuis houden om de vinger niet te klemmen.

Stap 2: Houd de voetsteun zijdelings aan de buitenkant van het frame van de rolstoel en monteer de voetsteun met de bijgeleverde pen in het frame. Zwenk de voetsteun langzaam naar binnen tot deze vastklikt. (Afbeelding 2)

Gebruik van de rolstoel

Zelf rijden met de rolstoel Zet de remmen los. Neem de aandrijfhoepels aan de bovenzijde vast. Leun voorwaarts en draai de hoepels naar voor tot Uw armen gestrekt zijn. Breng Uw handen terug naar de bovenzijde van de hoepels en herhaal de beweging. (Afbeelding 3)

Afbeelding 3



Afbeelding 4



Bedienen van de remmen

Druk de hendels van de remmen naar voren tot u een duidelijke klik voelt. Om de remmen uit te schakelen. Zet eerst één rem los door de hendel naar achteren te trekken. Houd het ongeremde wiel, met Uw hand, vast aan de grijpvoepel. Los de andere rem door de hendel naar achteren te trekken. (Afbeelding 4)

Hindernissen


In geval van een obstakel houdt de begeleider met beide handen de handvaten vast, trapt met de voet de onderste bodembuis van de rolstoel omlaag en kantelt de rolstoel naar achteren, zodat het voorwiel omhoog komt en over het obstakel gaat. (zoals getoond in Afbeelding 5)

Afbeelding 5



Afbeelding 6

leuning
bevestiging

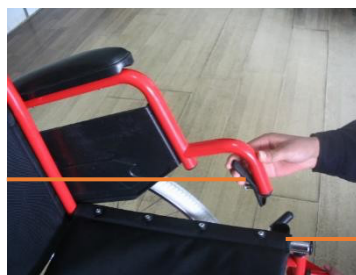

Voorste beugel
van de

Armsteun

Wanneer de leuning wordt verwijderd, drukt u met één hand op de leuningbevestiging om deze uit de voorste beugel van de zitbuis te verwijderen en naar boven te draaien; (Afbeelding 6) 5) Voetsteun aanpassen. Draai eerst de borgmoer los met de sleutel, trek dan de pedaalsteun naar beneden, stel het pedaal in de juiste stand, en gebruik dan de sleutel om de bout met de klok mee vast te zetten. (Afbeelding 7)

Het opklappen of verwijderen van de voetsteunen

Zwenk de beensteunen nooit naar binnen!

Om de beensteunen te laten zwenken trekt u met 1 hand aan de hendel (Afbeelding 8) en met de ander hand zwenkt u de beensteun naar buiten. En klap de voetplaat naar boven Doe dit met beide beensteunen en u kunt gemakkelijk uitstappen. Wilt u de beensteunen verwijderen dan trekt u de beensteun naar boven.



Afbeelding 7



Afbeelding 8

Het opvouwen van de rolstoelen:


Klap de voetplaten van de beensteunen omhoog. Neem de zitting aan de voorzijde en achterzijde in de hand en trek deze naar boven. (Afbeelding 9)

Uitvouwen van de rolstoel:

Houdt de rolstoel schuin met 1 achterwiel in de lucht en druk met de andere hand op de buis van de zitting. De rolstoel klapt dan open. Druk de zitting goed aan bij de voorzijde en controleer op de beensteunen goed gemonteerd zijn.

Let op! Gevaar voor letsel!

Ga niet op de beensteunen staan bij het uitstappen of gaan zitten in de rolstoel. Zorg ervoor dat de rolstoel altijd op de rem staat bij het in of uitstappen in de rolstoel!

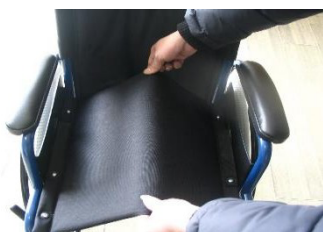

Afbeelding 9

Reiniging | onderhoud •

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chlooren azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met uw leverancier waar u dit product hebt gekocht.
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

Transport en opbergen

Let op ! Gevaar voor letsel!

- Til de rolstoel nooit op met een persoon in de rolstoel.
- Rijdt niet van trappen af met een persoon in de rolstoel
- Gebruik geen roltrap. Gebruik altijd een personen lift om naar een andere verdieping te gaan in een gebouw.
- Blijf niet in de rolstoel zitten bij gebruik in de auto.
- Het gewicht van de rolstoel is 22 Kg.
- Til de rolstoel niet aan armleuningen of beensteunen op. Til de rolstoel altijd opgevouwen op aan het frame.
- Zorg ervoor tijdens transport in de auto dat rolstoel veilig in de kofferbak ligt. Wanneer dat niet kan. Moet u de rolstoel met spanbanden vast zetten aan de daarvoor bestemde haken in de auto of bus.

Opslagcondities:

Maak de rolstoel schoon en droog voordat u deze opbergt.

Zorg ervoor dat de omgeving schoon en droog is. Berg de rolstoel niet op in vochtige omgeving.

Anders kan dit leiden tot voortijdige roestvorming van de rolstoel of schade aan het decoratieve materiaal van het oppervlak, met ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg.

Bewaar of gebruik de rolstoel niet in de buurt van open vuur of brandbare voorwerpen, omdat dit ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken.

Garantie en onderhoudsschema:

Garantie bedraagt 24 maanden na aankoop. Mits dit product onderhouden is door een Scootplaza erkende werkplaats of dealer bedrijf.

Uitgesloten zijn voor garantie slijtage delen zoals: banden, remmen en bekleding.

Leverancier rolstoel:

Factuur nummer :

Aankoop datum:

Datum onderhoud:

Datum onderhoud:

Datum Onderhoud:

Datum onderhoud:

Datum onderhoud:

Welke onderdelen zijn vervangen onder garantie:

Datum vervanging:

Dealer stempel:

Technische specificaties

Omschrijving	Rolstoel
	PIAZA PL1
Totale lengte incl. voetsteun	1040 mm
Hoogte	910 mm
Breedte	610 mm
Breedte dichtgevouwen	265mm
Zitbreedte	450 mm
Zitdiepte	400 mm
Zithoogte aan voorzijde	
Armsteun hoogte	260mm
Afstand tussen armsteunen	470mm
Rughoogte	410mm
Hoogte van de voetsteun tot de grond	150mm
Totaal gewicht	20.6kg
Max. gebruikersgewicht	114 kg

Omschrijving	Rolstoel
	PLAZA PL1
Diameter stuurwielen	(200-203)mm
Diameter achterwielen	(600-610)mm
Materiaal bekleding	Oxford cloth
Brandwerend materiaal	Rug & zit
Statische stabiliteit vooruit	$\geq 10^\circ$
Statische stabiliteit achteruit	$\geq 10^\circ$
Statische stabiliteit zijwaarts	$\geq 15^\circ$
Statische stabiliteit bergop	$\geq 8^\circ$
Draaicirkel	≤ 850 mm

Let op!

Omdat wij onze producten voortdurend verbeteren. Kunnen specificatie wijzigen. Wij geven geen voorgaande kennisgeving van deze wijzigingen

Fabrikant:

INTCO Metal products.

The products are sold to the United States, Britain, France, Russia and other countries, and the products are mainly exported. The Company has passed the EN ISO 13485:2016 Quality System Certification. INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD. Add: FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, P.R. China Zip code: 999077 Tel: +86 511 83174088

EU-REP: Scootplaza B.V. Adres: Euroweg 25, 3825HA Amersfoort, Nederland - scootplaza.nl