


Menstruatie Warmte Band

--Handleiding


Verpakkingsinhoud

Kijk alsjeblieft of de Inhoud compleet is
Warmte apparaat + Band
Oplaadkabel
Handleiding

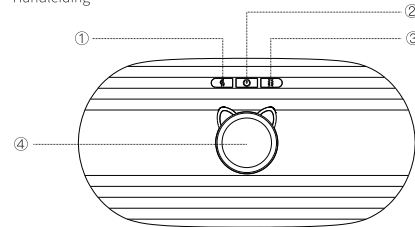

Onderdelen Introductie

① Temperatuurcontrole toets ②2-aan/uit knop ③vibratie toets
④ Display

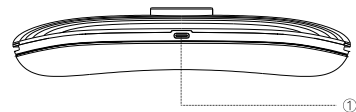

Onderdelen Introductie

① USB-C oplaadpunt

Draaginstructies

Maak de riem los met het clipje, doe hem om je middel en verstel hem naar de gewenste maat.

Oplaad instructies

1. Stop de USB-C kabel in het USB-C oplaadpunt, de display laat het zien wanneer het apparaat oplaad en wanneer hij vol is.
2. Het is niet de bedoeling dat het product wordt opgeladen terwijl het product aan staat. Als de kabel in het product zit is het ook niet meer mogelijk om hem te gebruiken.

Instructies voor gebruik

1. Voordat je dit product voor het eerst gebruikt zorg dan dat hij eerst helemaal volgeladen is.
2. Druk en houd de aan/uit toets ingedrukt voor 2 seconden, Het display zal aan gaan en dan staat het apparaat in de ingeschakelde stand.

3. In de ingeschakelde stand:

Druk eenmaal kort op de "temperatuurcontrole toets", het display toont 45°C, en gaat naar het eerste niveau van hete compressie en moxibustie, moxibustie modus 40-45°C; druk nogmaals kort op de toets, het display toont 55°C, en gaat naar het tweede niveau van compressie en moxibustie. moxibustie modus 50-55°C; druk nogmaals op de toets, het display toont 65°C, dit is het derde niveau van compressie en moxibustie, moxibustie modus 60-65°C; druk nogmaals op de toets, het display toont 0°C, hier stopt het compressie en moxibustie proces. Doe dit steeds weer in herhaling voor hetzelfde resultaat.

4. In de ingeschakelde stand:

Druk eenmaal kort op de "vibratie toets". Op de display verschijnt "vibration level I", nu staat hij in de eerste vibratie stand op een lage frequentie, druk nogmaals kort op de vibratie toets, op de display verschijnt "vibration level II", hij staat nu in de tweede vibratie stand op een gemiddelde frequentie, druk nogmaals op de toets, op de display verschijnt "vibration level III", hij staat nu in de derde stand voor trillingen van hoge frequentie. Druk nog nog een keer op de toets, op de display verschijnt, "vibration level 0", de vibratie is nu volledig gestopt. Doe dit steeds weer in herhaling voor hetzelfde resultaat.

5. In de ingeschakelde stand:

Houd de "aan/uit toets" voor 2 seconden ingedrukt, om het apparaat in de uitgeschakelde stand te zetten, het apparaat en het display gaan dan tegelijkertijd uit.

6. Wanneer de batterij van de menstruatie band bijna leeg is als hij aan staat, gaat het "lege batterij symbool" knipperen op de display, voor 10 seconden en dan valt het apparaat uit.

7. Wanneer je de menstruatie warmte band wilt gaan aanzetten en de batterij is leeg, zal het lege batterij symbool gaan knipperen voor 10 seconden en vervolgens niet aan gaan. powered on.

Voorzorgsmaatregelen

1. Lees alsjeblieft alles zorgvuldig door en zorg dat je alle aspecten van de handleiding begrijpt voordat je het product gebruikt.
2. Zwangere vrouwen, kinderen, hartpatiënten, mensen met een abnormale bloeddruk, mensen met kwaadaardige tumoren, patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen, patiënten met acute ziekten of andere mensen die een medische behandeling ondergaan, mogen het niet gebruiken.
3. Het is verboden voor mensen die niet kunnen lezen en/of begrijpen hoe het product in zijn werking gaat en gebruikt moet worden.
4. Mensen met een gevoelige huid mogen het niet gebruiken.

5. Het is verboden om te gebruiken voor patiënten met een verminderd gevoel in de huid of die niet gevoelig zijn voor warmte.

6. Het is verboden om de trilfunctie tijdens de menstruatie te gebruiken. Dit zou een toename van de menstruatie klachten veroorzaken. Het wordt aanbevolen om alleen de verwarmingsmodus te gebruiken.

7. Als u tijdens het gebruik ongemak voelt of huidafwijkingen voelt/ziet, stop dan meteen met het gebruik en raadpleeg een arts.

8. Het is verboden om dit product te gebruiken met hoge temperaturen of ontvlambare, elektromagnetische straling en op vochtige plaatsen.

9. Het is verboden om dit product zelf te demonteren en te monteren om botsingen en binnendringen van water tegen te houden aangezien dit storingen veroorzaakt.

10. Het is verboden het product met water of andere reinigingsmiddelen in contact te brengen, dit kan storingen veroorzaken door het binnendringen van vocht in het apparaat.

Specifications

Product naam	Slimme Menstruatie Warmte Band
Product model	WL-i01
Ingangsspanning	5V = 2A
Oplaadpunt	USB-C
Temperatuur	45°C tot 65°C
Batterijcapaciteit	5000 mAh
Oplaaadtijd	4 uur
Materiaal	ABS+flanel
Gewicht	296g
Afmetingen	190x95.2x38.3mm
Uitvoerende norm	GB4706.1- 2005 / GB4706.10- 2008

Fabrikant: Shenzhen Wuyang Wandai Technology Co., Ltd.
Adres: Gebouw B5, Yinlong Industrial Park, Shenshan Road, Longgang District, Shenzhen
Plaats van Herkomst: Shenzhen, China
Inspectie: gekwalificeerd product

Made In China



Garantie bepalingen

Dit product heeft een jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Deze garantiekaart is geldig als je nog een aankoopbewijs hebt van het product. Als er bij normaal gebruik een niet door de mens veroorzaakte fout is, zorg er dan voor dat het uiterlijk van het pakketje, de accessoires en het product zelf intact blijft. Zodat je deze intact kunt opsturen. Nadat de fout is bevestigd, kunt u ervoor kiezen om deze te laten repareren of te vervangen.

De volgende aandoeningen vallen niet onder de garantie:

Storing en schade veroorzaakt door ongeoorloofde demontage, wijziging en onderhoud; Storing en schade veroorzaakt door alle menselijke factoren zoals vallen tijdens gebruik; Storing en schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing; Bij deze punten is de garantie niet meer geldig. (Dit is een vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

Garantiekaart

Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen!

Product naam:
Gebruikersnaam:
Telefoonnummer:
Contactadres:
Aankoopdatum:
Winkel van aankoop:
Foutbeschrijving:
Garantie Tijd: