



S15-Slimme Draagbare Dubbele Borstkolf

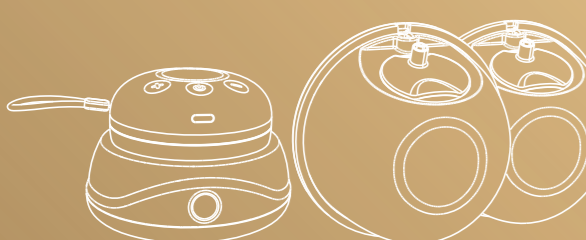

Handleiding

Lees de handleiding aandachtig door wanneer u een elektrische borstkolf gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie!


Inhoud

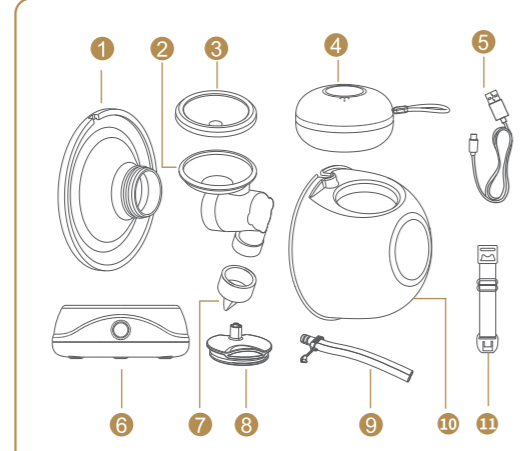

Alle onderdelen

1 Siliconen borstschild x2	2 Tussenstuk x2
3 Siliconen diafragma x2	4 Pompmotor x1
5 Type-C USB-kabel x1	6 Houder x1
7 Klep x2	8 Afsluitplaatjes x2
9 Siliconen catheter x1	10 Melkopvangbak x2
11 Bh Aanpassingsgesp x2	

Onderdelen Motorunit

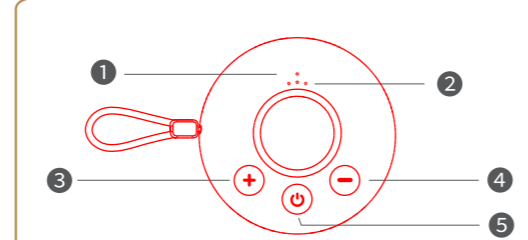

1 Batterij-indicator	2 Indicatielampje voor modi
3 Niveau omhoog	4 Niveau omlaag
5 Aan/uit-knop met functie voor pauzeren/afspelen	


Waarschuwing
 Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij. Wanneer de batterij-indicator rood knippert, raden we u aan een gecertificeerde 5V-1A-adapter te gebruiken om de pompmotor zo snel mogelijk op te laden.

Schoonmaken & desinfecteren


• Reinig en desinfecteer voor het eerste gebruik en na elk gebruik alle onderdelen die in contact komen met moedermelk.
 • Was of steriliseer de pompmotor nooit. Deze komt niet in aanraking met de borst en borstvoeding. Reinig de motor met een schone, vochtige doek met water.
 • Voor schoonmaken wordt drinkwater aanbevolen.

In elkaar zetten


1. Plaats het siliconendiafragma op het tussenstuk en druk goed om de randen stevig vast te maken om een perfecte afdichting te garanderen.




2. Installeer de klep op het tussenstuk en zorg ervoor dat deze in de juiste richting is geïnstalleerd.

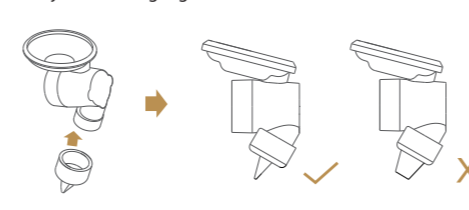


3. Plaats het tussenstuk in de melkopvangbak en druk met beide duimen op het tussenstuk om de randen stevig vast te maken om een volledige afdichting te garanderen.

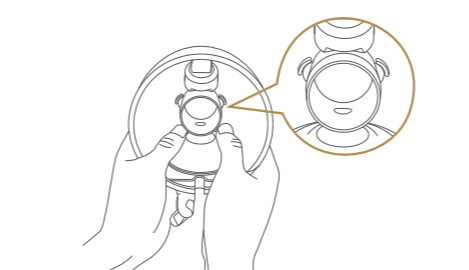


4. Installeer het siliconen diafragma op de melkopvangbak en lijn de groef op het siliconen schild uit in de positie van de groef van de melkopvangbak.

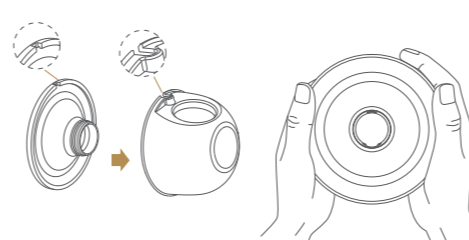


5. Druk de pompmotor op de melkopvangbak en zorg ervoor dat deze perfect past.

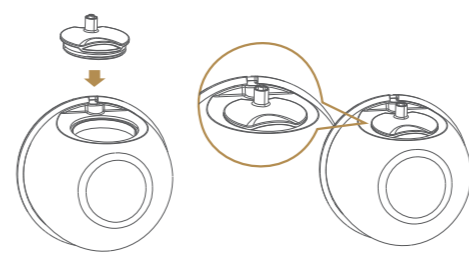


6. Haal de stofhoes van de USB-C kabel en sluit de UST-C kabel aan om de pompmotor op te laden.

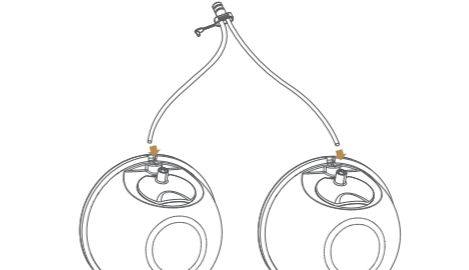

7. Plaats de pompmotor op de houder. Zorg ervoor dat deze goed uitgelijnd zijn elkaar zodat het perfect op elkaar aansluit

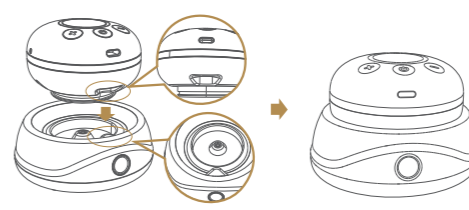




8. Steek het andere uiteinde van de siliconenslang in het gat van de houder om de montage te voltooien.

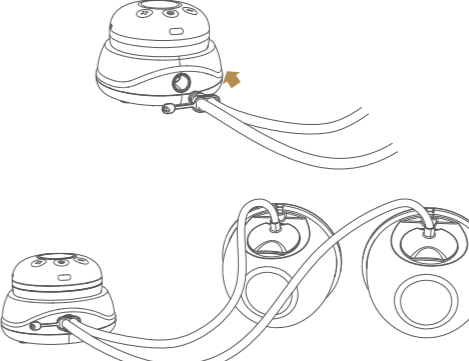


De borstkolf gebruiken


1. Plaats de borstkolfset op uw borst. Zorg dat uw tepel in het midden zit en houd het rechtop. Zorg ervoor dat u de positie van het product en de borst niet vervormt, anders heeft de borstkolf geen zuigkracht.

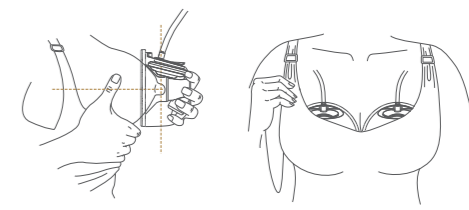


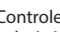
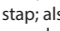
2. Druk lang op  om aan te zetten. Controleer of het indicatielampje wit is (enkelzijdige modus). Als het lampje wit is, gaat u verder met de volgende stap; als het indicatielampje paars is (dubbelzijdige modus), druk dan lang op  om over te schakelen naar eenzijdige modus en het indicatielampje wordt wit.

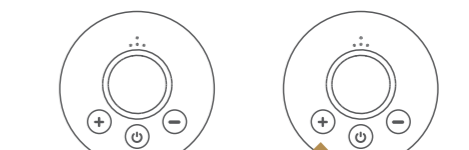





Lang indrukken om aan/uit te zetten




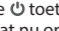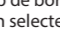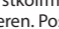


Lang indrukken om van modus te wisselen

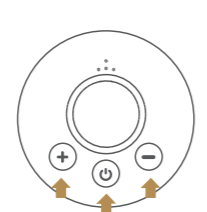3. Druk kort op de  toets om de modi te wisselen. Het eerste moduslampje staat nu op de borstkolfmodus. U kunt de  en  toetsen selecteren. Postpartum borstvoedende borsten kunnen ongemakken ervaren zoals zwelling en knobbels. Het gebruik van dit model kan borstproblemen verlichten.

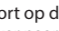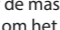

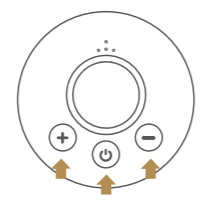
4. Druk nogmaals kort op de  knop, het tweede moduslampje gaat aan, schakel over naar de massagemodus, u kunt op de toetsen  en  drukken om het vermogen te selecteren dat comfortabel aanvoelt. De melkkanalen na de bevalling zijn niet gemakkelijk te geleiden, deze modus kan borsten stimuleren en de afgifte van borstmelk bevorderen.

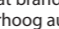

5. Druk nogmaals kort op de  toets en het derde moduslampje gaat branden. Schakel over naar de automatische modus, verhoog automatisch de intensiteit van het kolven van de borst, waarbij het interval telkens met 20 seconden wordt verlengd, totdat een bepaalde intensiteit is verhoogd. Tijdens dit proces, als er een toetsbediening is, stop dan met het verhogen van de intensiteit nadat de automatische verhoging van de intensiteit is voltooid. U kunt het opnieuw aanpassen door op  en  te drukken


Tip: Dit product heeft een ingebouwde geheugenfunctie, als je het weer inschakelt, gaat de machine automatisch naar de modus dat je de laatste keer hebt gebruikt.

6. Druk na het afkolven op de aan/uit-knop om de borstkolf uit te schakelen en verwijder de borstkolf voorzichtig van de borst.




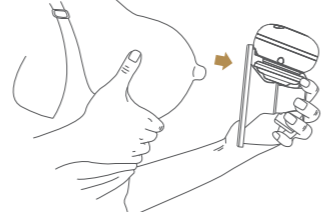


Na gebruik

Nadat u klaar bent met kolven, verwijderd u de borstkolf van de borst. Houdt de borstkolf rechtop en verwijder het siliconen.

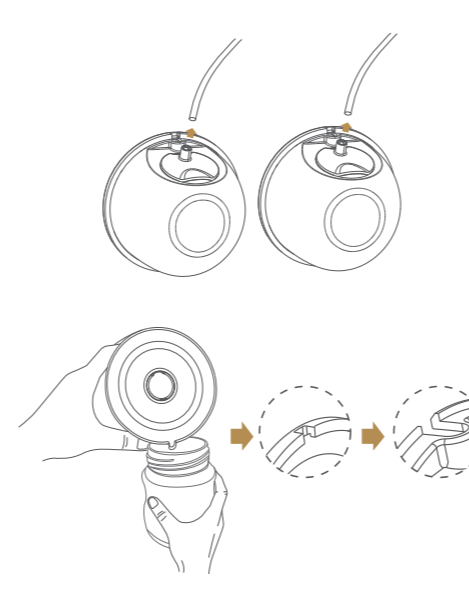


LED Batterij-indicator

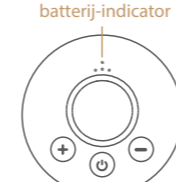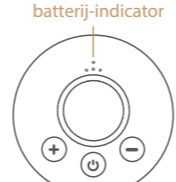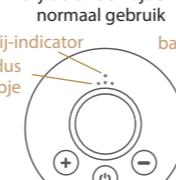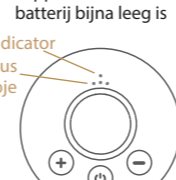 batterij-indicator Het stroomindicatielampje blijft branden tijdens normaal gebruik	 batterij-indicator De stroomindicator knippert wanneer de batterij bijna leeg is
 batterij-indicator modus lampje De stroomindicator licht op wanneer het lampje van de oplaadmodus achtereenvolgend knippert	 batterij-indicator modus lampje Wanneer volledig opgeladen zijn alle lichten aan

Opmerking:
 1. Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.
 2. De continue gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de batterij of de werkomstandigheden.
 3. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijvermogen of de omgevingstemperatuur.


Zithouding

Ontspan het lichaam, ga in een comfortabele stoel zitten en buig licht naar voren (gebruik een kussen om de rug te ondersteunen) zorg ervoor dat u de borstkolf en de melkopvangbak rechtop houdt.



Instructies voor bh aanpassingsgesp

Pas de lengte van de bh-bandjes aan, maak deze comfortabel. Het ene uiteinde van de beha-verstelgesp hangt aan de binnengesep van de voedingsbeha.

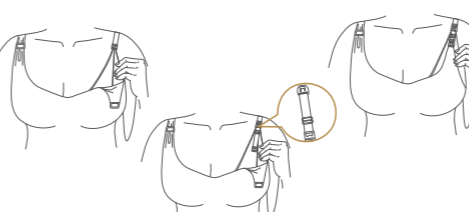

Afgelofde melk bewaren

Moedermelk bewaren

Bewaar de moedermelk in een schone en gesteriliseerde bewaarflles of verzegelde fles en zet ze onmiddellijk in de koelkast

Moedermelk ontdooien

Zet de bevroren melk een nacht in de koelkast om te ontdooien. In geval van nood kun je de melk ontdooien in een kom met heet water of gebruik een flessenwarmer om de melk snel op te warmen

Tip 1

- Bewaar alleen de moedermelk die is opgevangen met een gesteriliseerde borstkolf
- Bevries de moedermelk niet herhaaldelijk
- Meng geen moedermelk met bevroren moedermelk

Tip 2

- Onthoud! Controleer voor het voeden altijd de melktemperatuur.
- Verwarm moedermelk nooit in de magnetron, omdat dit waardevolle stoffen kan vernietigen
- Ongelijkmatige verhitting kan leiden tot plaatselijke oververhitting van de melk, wat brandwonden kan veroorzaken
- Dompel een bevroren fles niet onder in kokend water om barsten te voorkomen

Garantie omschrijving

Garantie kaart

Productgarantie kaartnummer _____

Product model _____

Serienummer _____

Gebruikersnaam _____

Telefoonnummer _____

Aankoopdatum _____ J _____ M _____ D _____