

AYOO DOUCHESTOEL MET RUG- EN ARMLEUNING

Montage instructie



Step 1 Overzicht foto van onderdelen



Step 2 Overzicht schoeven;



Step 3 Plaats het zitvlak van de stoel ondersteboven.




Step 4 Plaats de eerste buis, met de holle zijde naar beneden



Step 5 Plaats de tweede buis met de bolle zijde naar boven.



Step 6 Plaats een korte schroef op de plek waar beide buizen elkaar kruisen. Gebruik hierbij het ringetje zoals aangegeven

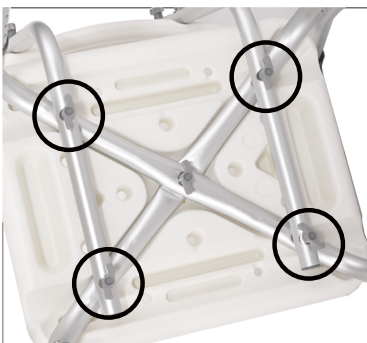

Step 7 Plaats de twee rugsteun-buizen zoals afgebeeld en gebruik hier 4 lange schroeven



Step 8 Plaats rugsteun met (handvat naar boven) en bevestig deze met 4 korte schroeven



Step 9 Plaats nu de stoelpoten in de buizen en vergrendel deze door de drukknop uit te laten springen.



Step 10 Plaats de armleuningen en zorg dat de drukknoppen uitspringen.



Step 7 Plaats de anti-slip kussens (blauw ter verduidelijking) op het zitvlak en de rugsteun van de stoel.



Step 7 Lees de veiligheidsvoorschriften, waarna de stoel gereed is voor gebruik.