

BioNase Anti-hooikoorts

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

- 1 Behandelingsprincipe
- 2 Voor wie
- 3 Gebruiksaanwijzingen
- 4 Reinigen
- 5 Technische gegevens

1 Behandelingsprincipe

De BioNase is gebaseerd op moderne geneeskunde en maakt gebruik van een halfgeleiderlaser. Het apparaat maakt gebruik van licht met een golflengte van 660 nm en een laserintensiteit van 8-12 mW voor het bestralen van de neusholte.

2 Voor wie

Voor iedereen die last heeft van symptomen veroorzaakt door hooikoorts, zoals een verstopte neus, niezen, duizeligheid, hoofdpijn, wazig zicht en gehoorproblemen.

3 Gebruiksaanwijzingen

- Verwijder het batterijklepje.
- Plaats een 9V alkalinebatterij in het batterijvak.
- Sluit de kabel aan op het apparaat.
- Zet de aan/uit-knop aan (Let op: haal de beschermkap van de kleine pin er niet af). Plaats de neusklem in de neus en zorg ervoor dat de 2 lichtpunten ongeveer 1 cm tot 1,5 cm diep in de neus gaan.
- Het groene lampje blijft branden als teken dat het apparaat normaal werkt. Als het knippert, duidt dit op een bedieningsfout (lage batterij of de kabel is niet correct aangesloten).
- Het groene lampje gaat automatisch uit na een behandelingssessie van 15 minuten.
- Gebruik het apparaat éénmaal per dag.

4 Reinigen

- Gebruik een zachte doek om de lichtpunten schoon te maken, dompel ze niet onder in water.
- Desinfectie: De lichtpunten kunnen gedesinfecteerd worden met 70% alcohol.
- Bescherming: Gebruik hetzelfde apparaat niet voor verschillende personen.

5 Technische gegevens

- 660 nm smalbandige lichtgolven
- Timer voor behandelingssessie: 15 minuten ($\pm 10\%$)
- Stroom: 4-8 mW voor elke pin
- Energie per keer: 1-2,5 J