 suivantes. La coupe FERTI-LILY n'est pas un moyen de contraception et ne vous protégera d'aucune infection sexuellement transmissible. Lavez-vous soigneusement les mains au savon doux avant toute manipulation de votre coupe. Veuillez ne pas utiliser la coupe FERTI-LILY si vous avez une infection bactérienne ou à levures. Reprenez l'utilisation une fois l'infection guérie. Si vous avez utilisé FERTI-LILY pendant une infection, il est recommandé de remplacer la coupe pour éviter que cette infection se renouvelle. Jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter dans les toilettes. Si vous ressentez des effets indésirables, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.



FAITES
L'AMOUR



RETOURNEZ
LA COUPE



INSÉREZ



ATTENDEZ
20 MIN




RETIREZ
LA COUPE



NETTOYEZ
LA COUPE

*Une étude clinique a montré que les femmes utilisant la Coupe de conception FERTI-LILY comme prévu pour 3 cycles ont 48 % de chances supplémentaires de devenir enceinte. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.FertiLily.com.

 **Fabricant:**
FERTI-LILY
Mr. Troublaan 7
1097 DP Amsterdam
The Netherlands
www.FertiLily.com

Distributeur
Belgique:
GFC Solutions
KMO-zone Duwijck
Kalderveld 37, 2500 Lier
E: info@GFCsolutions.be
T: +32 (0)3 291 64 14

CONTIENT:
1 coupe souple réutilisable
1 mode d'emploi
1 petit sac de rangement

Pays-Bas:
Alfaco B.V.
Basicweg 11D
3821 BR Amersfoort
T: +31 (0)33 455 6081
E: info@alfaco.nl

