

**PAVIS S.p.A.**

Sede Legale:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Buguggiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

www.pavis.it - info@pavis.it

pavispec@certimprese.it

R.I. / C.F. / P.IVA 01286640121

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo le norme ISO 9001, ISO 13485

Management system standards certified according to ISO 9001, ISO 13485

 ⓘ **PAVIS S.p.A.** - Dichiaro che il prodotto:

**FASCIA PER ERNIA OMBELICALE E ADDOMINALE**

basic UDI-DI 80287180000040MK

 è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i **DISPOSITIVI MEDICI** di classe 1

 ⓘ **PAVIS S.p.A.** - Hereby declares that the:

**ABDOMINAL AND UMBILICAL HERNIA BINDER**

basic UDI-DI 80287180000040MK

comply with the EU Medical Device Regulation 2017/745 (class 1 MD)


**1 - INDICAZIONI D'USO**

- Contenzione dell'ernia ombelicale/addominale

**2 - CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI**

Il modello scelto deve rispondere alle necessità individuate dallo specialista / tecnico ortopedico a seconda del quadro clinico. L'utilizzo della fascia dovrebbe limitarsi al periodo necessario, evitando di indossarlo per lungo tempo soprattutto se alla massima tensione, per non indebolire i muscoli addominali. Non indossare il dispositivo creando pressioni su parti del corpo che presentano lesioni gonfiori e tumefazioni. Preferibile indossarlo sopra una maglietta intima di cotone. Trattandosi di un prodotto **NON INVASIVO**, composto prevalentemente da materiali non allergici, non sono mai stati riscontrati effetti collaterali di alcun genere.

**3 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE**

- Prima di procedere, agganciare le parti in velcro



Questo dispositivo non è biodegradabile e anche se costituito di materiale di origine naturale, **AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE NON PUÒ ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. SMALTIRE INSIEME AI NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

**CE**