

# Gebruiksaanwijzing NeilMed Neusspray normaal en extra sterk

De NeilMed Neusspray is een medicijnvrije en niet-irriterende zout spray. Het geeft je verlichting bij neusallergieën, droge neus, overtollig slijm en verstopping als gevolg van een gewone verkoudheid of griep.

## Stap voor stap

### Stap 1

Plaats de spuitmond in je neusgat. Druk zachtjes op de knop tot je neuspassages vochtig zijn.

### Stap 2

Herhaal stap 1 voor je andere neusgat.

Voor baby's en kinderen de spuitmond niet verder in de neus brengen dan de verdikking/flens. Je kunt de NeilMed Neusspray zo vaak gebruiken als je wilt. Het werkt niet verslavend.

## Voordeel Neusspray extra sterk

NeilMed Neusspray extra sterk bevat een meer dan twee keer hogere concentratie zoutoplossing als de normale variant. Onderzoek toont aan dat een hogere concentratie zoutoplossing (2,7%) beter helpt bij een verstopping van de neus dan de normale variant (0,9%). De reden hiervoor is, dat de extra sterke zoutoplossing meer water uit de overbelaste slijmvliezen trekt en zwellingen vermindert. De neus- en sinusopeningen gaan daardoor beter open en kunnen zodoende beter draineren. Bij het eerste gebruik van de extra sterke variant kan tijdelijk een brandend of stekend gevoel optreden. Na een aantal keren gebruik trekt dit weg. Blijft het zich tot steeds voordoen, dan adviseren we je de normale variant te gebruiken.

## Belangrijk

- Deel NeilMed Neusspray niet met anderen vanwege de hygiëne en het voorkomen van besmettingen
- Tijdens het gebruik je neusholte niet volledig blokkeren om druk in de neus of oren te voorkomen
- Buiten bereik van kinderen houden
- Houder onder druk; niet doorprikken of verbranden
- Bewaren tussen 5° C en 55° C. Houd het uit de zon en uit de buurt van warmtebronnen.

Voorkom bevriezing

- Raadpleeg je arts voor het gebruik bij baby's en kleine kinderen