

Gebruikshandleiding Luxegoed Baby Elektrische Neusreiniger

Belangrijk!

1. Ruilen is niet mogelijk in het geval van normale slijtage of minimale schade. Ook als de de klant zelf schade veroorzaakt, bijvoorbeeld door foutief gebruik, valt dit buiten de geldige garantieperiode van 1 jaar.
2. De garantie is alleen beschikbaar wanneer je de datum van aankoop kunt bevestigen bij Babily. Gebruik hiervoor de garantiekaart.

1. Veiligheidsvoorschriften

- Houd je goed aan deze veiligheidsvoorschriften. Door de elektrische neusreiniger op de juiste manier te gebruiken, worden gevaarlijke situaties voorkomen en de veiligheid van jou en het kind gegarandeerd.

▲ Waarschuwing

Potentiële gevaarlijke situatie waarbij ongevallen of ernstig letsel kunnen optreden als deze situatie niet wordt vermeden.

▲ Voorzichtig

Potentiële gevaarlijke situatie waarbij ongevallen of ernstig letsel kunnen optreden als deze situatie niet wordt vermeden.

▲ Waarschuwing

- Raadpleeg een arts voordat je de neusreiniger gebruikt op jouw kind(eren) wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:
 - Hartaandoening(en) of kwaadaardige tumor(en)
 - Hart- en vaatziekten, gevoelige huid of andere huidaandoeningen
 - Een psychische stoornis, littekens in de neus, regelmatige zwelling van het lichaam of hoge koorts
 - Onder behandeling van een arts als gevolg van lichamelijke aandoeningen of kwalen óf in gebruik zijn/waren van behandelingen om schade aan weefsel (laesie) te herstellen
 - Onder behandeling van een arts als gevolg van kwalen of andere allergieën op neus, oogbol of oor of mogelijk dringende dokterszorg nodig
- Gebruik de neusreiniger niet voor andere doeleinden dan expliciet aangegeven in deze handleiding.

▲ Voorzichtig

1. Vermijd dat het opvangbakje van de neusreiniger overvol raakt en reinig deze na gebruik.
2. Zet de neusreiniger uit wanneer je de verschillende onderdelen los gaat koppelen.
3. Let op de volgende punten tijdens het gebruik van de neusreiniger:
 - A. Op welk zuigkrachtniveau staat de neusreiniger en ervaart het kind discomfort tijdens gebruik?
 - B. Als er sprake is van discomfort bij het kind, stop dan direct met het gebruik van de neusreiniger. Zorg ervoor dat het kind veilig is en neem daarna pas volgende stappen, door bijvoorbeeld het zuigkrachtniveau aan te passen.
4. Lees de handleiding goed door voordat je de neusreiniger gaat gebruiken.
5. Let op de volgende punten bij het opbergen van de neusreiniger:
 - A. Houd het product buiten bereik van kinderen.
 - B. Bewaar het product op een droge plaats.
 - C. Houd rekening met schadelijke invloeden waaronder luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, ventilatie, stof, wind, zout of andere verontreinigingen.
 - D. Niet op plekken bewaren waar trillingen of schokken zich voor kunnen doen.
 - E. Niet bewaren in dezelfde ruimte als chemische producten of gas.
 - F. Vermijd plekken met een bron van warmteopwekking zoals een open haard, radiator, kachel, tv of andere huishoudelijke apparaten.
 - G. Zorg ervoor dat de neusreiniger schoon is voor het volgende gebruik.

6. Neem contact op met Luxegoed via info@luxegoed.nl als er sprake is van mankementen aan de neusreiniger. Haal het product niet zelf uit elkaar.

7. Breng geen productwijzigingen aan.
 8. Onderhoud van de neusreiniger:
 - A. Controleer het apparaat en de bijbehorende onderdelen regelmatig.
 - B. Vermijd langdurig gebruik en controleer de neusreiniger voordat je het product opnieuw gebruikt.
- **Laat jonge kinderen niet met de neusreiniger spelen; losse onderdelen kunnen makkelijk worden ingeslikt!**
 - **Bespreek met een arts hoe vaak je de neusreiniger bij het kind kan gebruiken.**
 - **Stop het siliconen opzetstukje niet te diep in de neus van het kind. Druk daarnaast het uiteinde van het opzetstukje niet te hard tegen de neuswand aan.**
 - **Apparaat niet aanbrengen op oor, mond of oog. Deze neusreiniger is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van neusjes.**