

Gebruikershandleiding

1. Het downloaden van de app

Scan de QR code met je smartphone om de H Band app te downloaden, of zoek in de app-store op 'H Band'.

De app is beschikbaar voor:

- iOS/iPhone model 4S en hoger
- Android 4.4 en hoger

*scan de QR code met je telefoon
om de app te downloaden*




H Band

Let op: Laad de smartwatch bij het eerste gebruik minimaal twee uur op.

Sommige functies werken alléén als de smartwatch met de app is gelinkt.

2. De smartwatch dragen

- Stel de horlogeband in op de gewenste lengte en maak de gesp vast.
- Zorg ervoor dat de sensor goed contact maakt met de huid, en dat deze niet kan verschuiven.
- Schakel 'raise to wake' in.

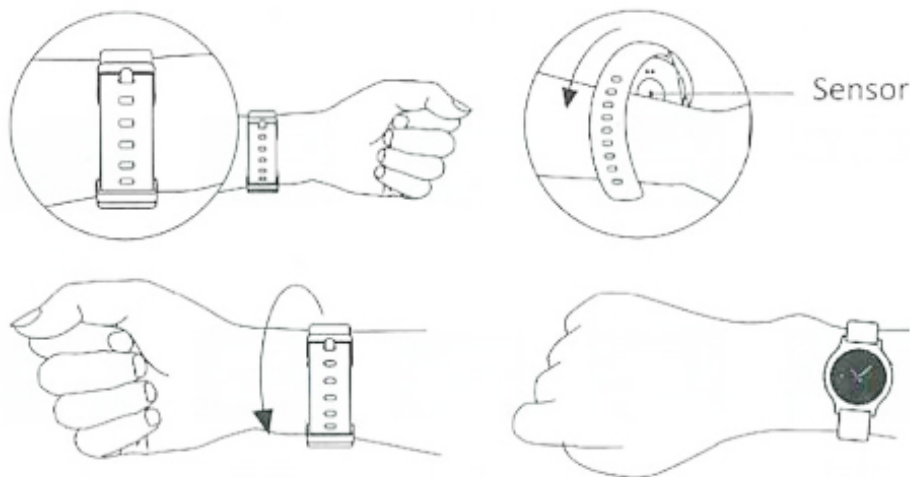

zorg dat de sensor goed contact maakt met de huid

3. Aan- en uitzetten

Wanneer je de smartwatch aanzet of uitzet, laat deze de onderstaand animatie zien:




4.

gedeelte


**Het
touchscreen-**

Het touchscreen gedeelte bevindt zich aan de onderkant van het scherm

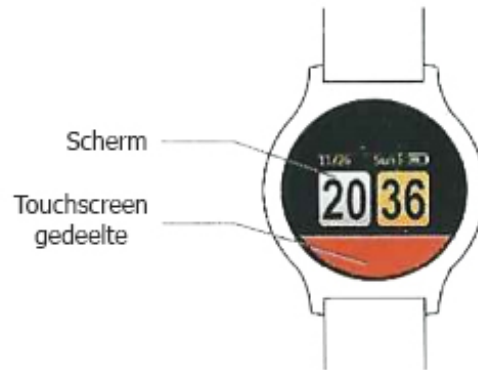

5. Verbinding

Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op je smartphone en de app is geïnstalleerd. Start de app, en selecteer 'Connect Device'. Selecteer vervolgens 'Binding Management'. Je telefoon zal nu de smartwatch detecteren. Selecteer de smartwatch in de lijst met zoekresultaten om de smartwatch met je telefoon te linken.

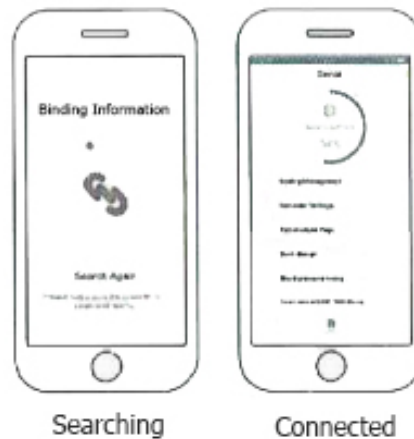

Let op: Als je een iPhone gebruikt en de verbinding tussen de smartwatch en je telefoon is verbroken zal deze niet vibreren, geen geluidssignalen geven en geen push-berichten tonen.

6. Het gebruik

- Hou de touch-knop onderaan het scherm ingedrukt om de smartwatch in te schakelen wanneer je deze in gebruik neemt.
- Je kunt tussen de verschillende menu's schakelen door op de touch-knop te drukken.
- Hou de knop langer ingedrukt om de hartslagmonitor, bloeddrukmeter of camera bediening in te schakelen.
- Hou bij de tijdsweergave de knop ingedrukt om te schakelen tussen drie verschillende tijdsweergaven.

7. Functies en Weergave

- Hou je pols omhoog of hou de knop ingedrukt om je horloge te activeren. Door de knop wederom ingedrukt te houden schakel je de hartslagmonitor, bloeddrukmeter of camera bediening in.



Alarm



Bloeddruk
meter



Caloriënver
bruik



Camerabedi
ening



Stappente
ller



Afstand



Gesprek



Rusten




Hartslag



Slaap



Tijd/
datum

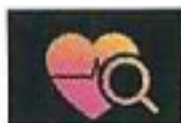

Fitheids
tes
t



Informatie



Uitschake
le
n




Zuurstof

Schakel tussen de pedometer (stappenteller), overzicht calorieverbruik en afgelegde afstand. (in kilometers; hou in dit scherm de knop ingedrukt om een activiteit in te stellen). De slaap-monitor wordt automatisch geactiveerd, hiervoor zijn geen acties nodig. De home-pagina kan in drie

verschillende stijlen worden weergegeven. Deze kun je kiezen door in de app te kiezen voor 'Device' en dan 'Display'.

8.Oplader

- a. Hou de smartwatch met het oplaadpunt in de juiste richting.
- b. Zorg ervoor dat de stekker van de oplader goed contact maakt met de smartwatch.

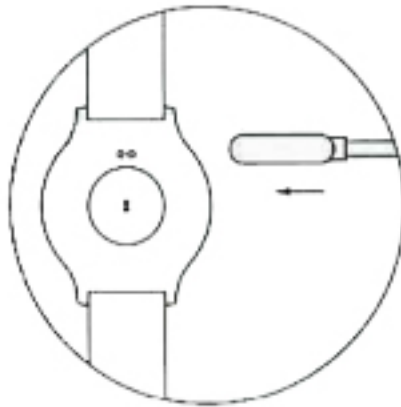

Steek de stekker van de oplader in het daarvoor bestemde contact

9.Basisspecificaties

Apparaat type	Bloeddruk- en hartslagmonitor
Beeldscherm	0,95 inch OLED
Batterij type	Polymeer Lithium batterij
Capaciteit	170 mAh
Verbindingsmodus	BLE 4.0 Low-Power Bluetooth
Aanbevolen omgevingstemp.	0° C ~ 40° C
Waterdicht	IP67

10. Inhoud

- 1 x Smartwatch
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Gebruikershandleiding

© **brkly.nl**; **niets uit deze uitgave** mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.