


FORA[®] 6 Connect

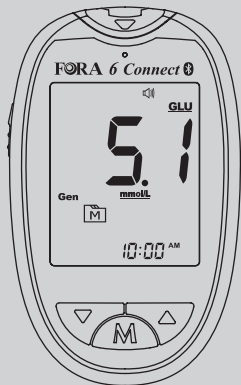

Multi-functional Monitoring System /
Multifunktionales Messsystem /
Système de surveillance multifonctionnel /
Sistema di controllo multifunzionale /
Multifunctioneel meetsysteem /
Višenamjenski sustav za praćenje /
Мултифункционална система за наблюдени /
Fjölvirkt eftirlitskerfi

Owner's Manual /

Bedienungsanleitung /

Manuel de l'utilisateur /

Manuale dell'utente /

Gebruikshandleiding /

Priručnik za korisnika /

ръководството на потребителя /

Eigandahandbók



Veiligheidsinformatie

Lees de volgende veiligheidsinformatie grondig voordat u het toestel gebruikt.

• Gebruik dit toestel ENKEL in overeenstemming met het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. • Gebruik GEEN accessoires die niet zijn gespecificeerd door de fabrikant. • Gebruik het toestel NIET als het niet behoorlijk werkt of als het beschadigd is. • Dit toestel dient NIET om symptomen of ziektes te genezen. De gemeten gegevens dienen enkel als referentie. Raadpleeg steeds uw arts om de resultaten te laten interpreteren. • De teststrips voor bloedglucose/hematocriet/hemoglobine mogen worden gebruikt bij pasgeboren baby's. • De teststrips voor β -Keton, totale cholesterol en urinezuur mogen NIET worden gebruikt bij pasgeboren baby's. • Lees alle aanwijzingen aandachtig en probeer de test uit voordat u dit toestel gebruikt. Voer alle kwaliteitscontroles uit zoals beschreven in de aanwijzingen. • Houd het toestel en het testmateriaal uit de buurt van kleine kinderen. Kleine onderdelen zoals batterijdeksels, batterijen, teststrips, lancetten en foeliodopjes kunnen gevaar voor verstikking inhouden. • Gebruik dit instrument NIET in de onmiddellijke omgeving van sterke elektromagnetische stralingsbronnen, aangezien deze de correcte werking kunnen verstoren. • Behoorlijk onderhoud en tijdige ijking van het toestel samen met de controleoplossing zijn fundamenteel om een lange levensduur van uw toestel te waarborgen. Als u zich zorgen maakt om de nauwkeurigheid van de meting, gelieve dan contact op te nemen met de verkoper of de klantendienst voor bijstand. **BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN OP EEN VEILIGE PLAATS**

Belangrijke informatie

Bij ernstige uitdroging en overmatig waterverlies kunnen de afgelezen resultaten lager zijn dan de eigenlijke waarden. Als u denkt dat u aan ernstige uitdroging lijdt, raadpleeg dan onmiddellijk een zorgverlener. • Als uw testresultaten lager of hoger zijn dan gewoonlijk en u geen symptomen van ziekte vertoont, herhaal dan eerst de test. Als u symptomen vertoont of nog steeds hogere of lagere resultaten verkrijgt dan gewoonlijk, volg dan het behandelingsadvies van uw zorgverlener. • Gebruik enkel verse volbloedmonsters om een test uit te voeren. Als u andere stoffen gebruikt, verkrijgt u foute resultaten. • Als u symptomen vertoont die niet stroken met de resultaten van de glucosetest en u alle aanwijzingen in de gebruikshandleiding hebt gevolgd, neem dan contact op met uw zorgverlener. • We raden het gebruik van dit product niet aan bij uiterst hypotensieve personen of patiënten in shock. Bij personen in een hypoglycemische hyperosmolaire staat, met of zonder ketose, kunnen de afgelezen resultaten lager zijn dan de eigenlijke waarden. Gelieve uw zorgverlener te raadplegen vóór gebruik. • De gebruikte meeteenheid om de concentratie bloedglucose aan te geven kan mg/dL of mmol/L zijn. De berekeningsregel bij benadering voor omzetting van mg/dL naar mmol/L is:

mg/dL	gedeelde door 18	= mmol/L
mmol/L	vermenigvuldigd met 18	= mg/dL

Bijvoorbeeld:

$$1) 120 \text{ mg/dL} \div 18 = 6,6 \text{ mmol/L}$$

$$2) 7,2 \text{ mmol/L} \times 18 = 129 \text{ mg/dL ongeveer}$$

Inleiding

Bedoeld gebruik

Dit systeem is bedoeld voor uitwendig gebruik (*in vitro* diagnostisch gebruik) door personen met diabetes thuis en door zorgverleners in klinische omgevingen, als hulp om de doeltreffendheid van de diabetescontrole te controleren. Het is bedoeld voor de kwantitatieve meting van het bloedglucose-, hematocriet-, hemoglobine-, β -keton-, totale cholesterol- en urinezuurniveau in volbloed. Het mag niet worden gebruikt voor de diagnose van diabetes.


Professionals kunnen capillaire en veneuze bloedmonsters testen. Gebruik enkel heparine als antistollingsmiddel voor het volbloed.

Thuisgebruik is beperkt tot capillair bloed van de vingertoppen en de goedgekeurde plaatsen.


Testprincipe

Dankzij de verschillende soorten teststrips kunt u met uw FORA 6 Connect Multifunctionele Meetsysteem de hoeveelheid bloedglucose, hematocriet, hemoglobine, β -Keton, totale cholesterol en urinezuur in volbloed meten. De test is gebaseerd op de meting van de elektrische stroom die wordt opgewekt door de reactie van verschillende stoffen met het reagens van de strip. De meter meet en berekent de huidige bloedglucose, hematocriet, hemoglobine, β -Keton, totale cholesterol of urinezuur en geeft het resultaat weer. De kracht van de door de reactie geproduceerde stroom hangt af van de hoeveelheid stof in het bloedmonster.

Produktübersicht

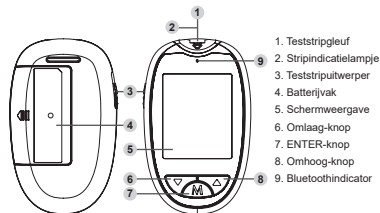

Schermweergave

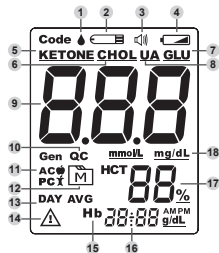

1. Bloeddruppelsymbool
2. Teststrip-symbool
3. Universele toon-symbool
4. "Batterij bijna leeg"-symbool
5. Keton-symbool / Ketonwaarschuwing

Aan de slag Begininstelling

Gelieve de procedure voor de begininstelling te volgen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt of nadat u de batterij hebt vervangen. Wanneer de batterij bijna leeg is en "E-b" en het " " op het scherm verschijnen, kan de meter niet worden aangezet.

Stap 1: Open de instelmodus

1. De meter gaat automatisch aan wanneer een nieuwe batterij wordt geplaatst.

Opmerking: Wanneer u de meter voor de eerste keer inschakelt door te drukken op de HOOFD-knop, wordt de meter automatisch uitgeschakeld als gevolg van geen gegevens.

2. Start met de meter uit (geen teststrip geplaatst). Houd ▲ en ▼ tegelijkertijd ingedrukt.




Stap 2: De instellingen configureren (datum, uur, universele toon, geheugen wissen

6. Totale cholesterol-symbool
7. Bloedglucose-symbool
8. Urinezuur-symbool
9. Testresultaat
10. QC-modus
QC - controleoplossingstest
11. Meetmodus
AC - vóór maaltijd
PC - na maaltijd
Gen - om het even welk ogenblik van de dag
12. Geheugen-symbool
13. Daggemiddelde
14. Waarschuwingssymbool
15. Hemoglobine-symbool
16. Datum en uur
17. Hematocrietniveau
18. Meeteenheid
(De meeteenheid van de meter is afhankelijk van de werkelijke specificaties binnen het verkoopgebied.)




en herinneringsalarm)

Druk op ▲ of ▼ om de waarde aan te passen of de stelling te activeren/deactiveren. Druk dan op de knop ENTER om de instelling te bevestigen en naar een ander veld te gaan.

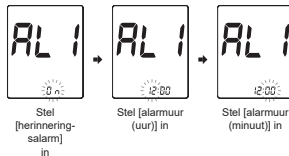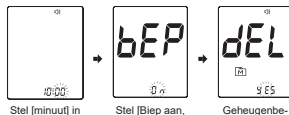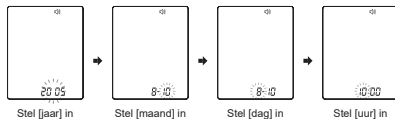

Opmerking: • Druk op ▲ om Biep aan, Universele toon of Biep uit te selecteren. Druk op de knop ENTER om te bevestigen.

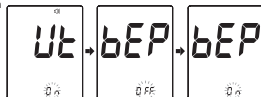

- Wanneer Universele Toon aan staat, begeleidt de meter u door de bloedglucosestet aan de hand van bieptonen en worden ook de resultaten in series bieptonen gegeven.
- Wanneer Biep uit staat, blijft de alarmfunctie werken.
- Selecteer voor het wissen van het geheugen " **RD** " (nee) om alle opgeslagen resultaten te bewaren.
- U kunt tot vier herinneringsalarmen instellen.
- Druk om het alarm uit te schakelen op **▲** of **▼** om van AAN naar UIT te gaan. Druk op de knop ENTER om te bevestigen.
- Wanneer het alarm afgaat, wordt het toestel automatisch aangezet. Druk op **▲** om het alarm uit te zetten. Als u niet op **▲**, drukt, biept het toestel 2 minuten en wordt het uitgeschakeld.
- Als er tijdens de instelmodus gedurende 3 minuten niets aan het toestel wordt gedaan, wordt het automatisch uitgeschakeld.

Vóór het testen

IJking

U moet de meter iJken telkens wanneer u een nieuw foil β -keton-/ totale cholesterol-/ urinezuurteststrips begint te gebruiken door de meter in te stellen met de juiste code. De testresultaten kunnen onnauwkeurig zijn als het codenummer dat wordt weergegeven op de meter nite overeenstemt met het nummer dat is gedrukt op het striplabel of de stripfolieverpakking.

Uw meter coderen (voor β -keton-/ totale cholesterol-/ urinezuurtest)

1. Breng de codestrip in wanneer de meter uit staat. Wacht tot het codenummer verschijnt op de weergave.

OPMERKING: Zorg dat het codenummer op de weergave, codestrip en teststripfoil of folieverpakking hetzelfde is. De codestrip mag niet vervallen zijn, zo niet kan een foutbericht verschijnen.

2. Verwijder de codestrip, op de weergave verschijnt "OFF". Dit betekent dat de meter klaar is met coderen en de β -keton-/ totale cholesterol-/ urinezuurtest kan beginnen.

Het codenummer controleren

U moet zorgen dat het codenummer dat wordt weergegeven op de meter overeenstemt met het nummer op uw teststripfoil of folieverpakking voordat u verder gaat. Als het overeenstemt, kunt u de test uitvoeren. Als de codes niet overeenstemmen, moet u stoppen met de test en de iJkingsprocedure herhalen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Klantendienst voor bijstand.

OPMERKING: De in deze handleiding gebruikte codes dienen enkel als voorbeeld; uw meter kan een andere code weergeven.


WAARSCHUWING: • Het is belangrijk dat u zorgt dat de op de LCD weergegeven code dezelfde is als de code op uw teststripfoil of folieverpakking voordat u de test uitvoert. Zo niet, krijgt u onnauwkeurige resultaten. • Als de op de LCD weergegeven code niet overeenstemt met de code op uw teststripfoil en het codenummer niet kan worden geüpdatet, gelieve dan contact op te nemen met de Klantendienst voor bijstand.

Testen met bloedmonster

Hoe ziet de teststrip eruit?



1. Absorptiegaatje
Breng hier een druppel bloed aan. Het bloed wordt automatisch geabsorbeerd.
2. Bevestigingsvenster
Hier wordt bevestigd of u voldoende bloed hebt aangebracht op het absorptiegaatje van de stri.
3. Handvat van de teststrip
Houd dit deel vast om de teststrip in de teststripgleuf te steken.
4. Contactstaafjes
Steek dit uiteinde van de teststrip in de meter. Duw het er stevig in tot het niet verder kan.

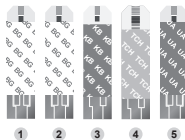

1. Bloedglucose
2. Bloedglucose / Hematocriet / Hemoglobine
3. β -Keton
4. Totale cholesterol
5. Urinezuur

Een teststrip inbrengen

Steek de teststrip in de gleuf.

Belangrijk! De voorkant van de teststrip moet naar boven worden geplaatst wanneer u de teststrip inbrengt. De testresultaten kunnen fout zijn als de contactstaafjes niet volledig in de testsleuf zitten.

Important! Om het risico van besmetting te beperken: • Deel nooit een lancet of prikapparaat met iemand anders. • Gebruik steeds een nieuw, steriel lancet. Lancetten zijn voor eenmalig gebruik. • Zorg dat er geen handlotion, olie, vuil of andere vreemde deeltjes in of op de lancetten en het prikapparaat kunnen komen.

Het prikapparaat klaarmaken

Raadpleeg de bijsluiters van het prikinstrument en de steriele lancet voor details.

Bloed van andere lichaamsdelen (Enkel voor teststrip voor bloedglucose)

Bij testen op alternatieve plaatsen (AST) controleren personen hun bloedglucoseniveau op andere plaatsen dan hun vingertoppen. Met de FORA teststrips is AST mogelijk op andere plaatsen dan de vingertoppen. Gelieve uw zorgverlener te raadplegen voordat u AST uitvoert. De testresultaten van andere plaatsen kunnen verschillen van de testresultaten van de vingertoppen wanneer de glucoseniveaus snel veranderen (bv. Na een maaltijd, na inname van insuline of tijdens of na lichaamsbeweging).

Wens raden ten stelligste aan dat u AST ENKEL uitvoert op de volgende ogenblikken:

- Net voor het eten of op een nuchtere maag (meer dan 2 uur sinds de laatste maaltijd).
- Twee uur of meer nadat u insuline hebt genomen.
- Twee uur of meer na lichaamsbeweging.

Baseer u NIET op de testresultaten van andere testplaatsen, maar gebruik monsters van de vingertop in de volgende gevallen:

- U denkt dat uw bloedsuiker laag is.
- U bent zich niet bewust van de symptomen wanneer u hypoglycemisch wordt.
- De resultaten stemmen niet overeen met hoe u zich voelt.
- Na een maaltijd.
- Na lichaamsbeweging.
- Bij ziekte.
- Bij stress.

Belangrijk! • Gebruik de resultaten van andere testplaatsen niet om permanente glucosemeetsystemen (CGMS) te kalibreren of om insulinedosissen te berekenen. • Kies bij elke test een andere plaats. Herhaaldelijk prikken op de zelfde plaats kan pijn en eelt veroorzaken. • Vermijd prikken op plaatsen met duidelijk zichtbare aderen om overmatig bloeden te voorkomen. • Aanbevolen wordt de eerste druppel bloed niet te gebruiken aangezien deze weefselvloeistof kan bevatten, waardoor de testresultaten mogelijk niet nauwkeurig zijn.

Een test uitvoeren



1. Steek de teststrip in de teststripgleuf van het toestel. Wacht tot het toestel het symbool "CH" en het symbool "d" weergeeft.

2. Druk op **▲** om de meetmodus in te stellen en druk op de knop **ENTER** om te bevestigen. (Alleen voor bloedglucose en bloedglucose-/hematocriet- / hemoglobinetest.)

• **Algemene Tests (Gen)** - op elk ogenblik van de dag ongeacht de tijd sinds de laatste maaltijd. • **AC (AC)** - geen voedselinname gedurende minstens 8 uur. • **PC (PC)** - 2 uur na een maaltijd. • **QC (QC)** - testen met controleoplossing.

3. Neem een bloedmonster.


Gebruik het vooraf ingestelde prikapparaat om op de gewenste plaats te prikken. Veeg na het prikken de eerste druppel bloed weg met een

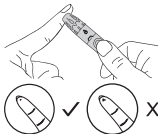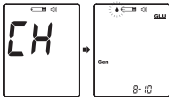

schoon doekje of wattenschijfje. Knijp zachtjes nog een druppel bloed uit de geprikte plaats. Wees voorzichtig dat u het bloedmonster NIET uitsmeert.

MEDEDELING: Vermijd teveel knijpen. Het testresultaat kan onnauwkeurig zijn wanneer het bloedmonster weefselvloeistof bevat. De hoeveelheid van het bloedmonster voor elke test bedraagt minstens:

- bloedglucosetest: 0,5µL
- bloedglucose-/ hematocriet-/ hemoglobinetest: 0,5µL
- β-ketontest: 0,8µL
- totale cholesteroltest: 3,0µL
- urinezuurtest: 1,0µL

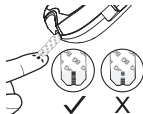

4. Breng het bloedmonster aan.

Houd uw vinger op het absorptiegeaite van de teststrip en de druppel wordt automatisch in de teststrip opgenomen. Neem uw vinger weg tot het bevestigingsvenster helemaal vol is. De meter begint af te tellen. Neem uw vinger pas weg wanneer u de biepton hoort.

5. Lees uw resultaat af.

De resultaten van uw bloedglucosetest verschijnen nadat de meter tot 0 heeft geteld. De resultaten worden automatisch in het geheugen van de meter bewaard.



(100 mg/dL = 5,5mmol/L)
Bloedglucose



Bloedglucose-/hematocriet-
/hemoglobinetest



Urinezuurtest



β-ketontest



Totale cholesteroltest

Keton-waarschuwing

• Wanneer uw bloedglucoseresultaat hoger is dan 240 mg/dL (13,3 mmol/L), geeft de meter de bloedglucosewaarde **GLU** en een keton-waarschuwing weer (**KETONE** knippert en "▲" symbool). • De keton-waarschuwing laat u weten dat u mogelijk een te hoog keton-niveau hebt en een keton-test raadzaam is.



Gebruikte teststrips en lancetten verwijderen

Om de gebruikte teststrip te verwijderen, duwt u gewoon de uitwerpknop van de teststrip omhoog om de gebruikte teststrip uit te werpen. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld nadat de teststrip wordt verwijderd. Om het gebruikte lancet te verwijderen, verwijdert u het uit het prikapparaat wanneer u klaar bent met testen. Verwijder uw gebruikte strip en lancet in een geschikte, prikbestendige houder.


Belangrijk! Het gebruikte lancet en de teststrip kunnen biologische risico's inhouden. Gelieve uw zorgverlener te raadplegen om het materiaal in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften te verwijderen.

Test van de controleoplossing

Onze controleoplossing bevat een gekende hoeveelheid stoffen die reageert met de teststrips en die wordt gebruikt om te waarborgen dat uw toestel en de teststrips correct met elkaar werken. Teststrips, controleoplossingen of steriele lancetten zijn mogelijk niet in de kit begrepen (gelieve de inhoud op uw productdoos te raadplegen). Deze kunnen afzonderlijk worden gekocht.

Ga als volgt te werk om de controleoplossing te testen:

1. Steek de teststrip in de teststripgleuf van het toestel. Wacht tot het toestel het symbool van de teststrip "☐" en het bloeddruppeltje weergeeft "▲".
2. De meter detecteert automatisch het verschil tussen de controleoplossing en bloedmonsters. Het markeert het resultaat automatisch als een controleoplossingstest met "QC" op de weergave.
3. Breng de controleoplossing aan. Schud de foel met de controleoplossing goed vóór gebruik. Knijp er een druppeltje uit en veeg schoon, knijp er dan nog een druppeltje uit en plaats op de punt van de foelidop. Houd het toestel zodanig vast dat het absorptiegaatje van de teststrip in aanraking komt met de druppel. Als het bevestigingsvensterje helemaal vol is, begint het toestel af te tellen.

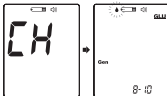

Opmerking: Breng om verontreiniging van de controleoplossing te voorkomen de controleoplossing niet rechtstreeks aan op een strip.



4. Lees het resultaat af en vergelijk. Na het aftellen tot 0 verschijnt het testresultaat van de controleoplossing op de weergave. Vergelijk dit resultaat met het bereik dat op de foel van de teststrip of de afzonderlijke folieverpak king is gedrukt. Het resultaat moet binnen dit bereik vallen. Als het testresultaat buiten dit bereik valt, lees dan de aanwijzingen opnieuw en herhaal de controleoplossingstest.

Opmerking: • De testresultaten van de controleoplossing worden bewaard in het geheugen. • Het controleoplossingbereik dat op de foel van de teststrip of afzonderlijke folieverpakking is gedrukt, is enkel bedoeld voor de controleoplossing. Het is niet het aanbevolen bereik of referentiewaarden. • Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor belangrijke informatie over uw controleoplossingen.

Resultaten buiten bereik:

Als u resultaten blijft verkrijgen die buiten het op de foel van de teststrip aangegeven bereik vallen, betekent dit dat de meter en de strips mogelijk niet goed werken. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw plaatselijke klantendienst of verkoper.


De testresultaten bekijken

Uw toestel bewaart de 1000 laatste testresultaten in het geheugen. Start om het geheugen van het toestel te openen met het toestel uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om alle testresultaten te bekijken:

1. Druk de knop ENTER of ▲ in en laat los. Het pictogram "☐" verschijnt op het scherm.
2. Druk op MAIN om de in het toestel opgeslagen testresultaten te bekijken. Druk meermaals op ▲ of ▼ om andere testresultaten weer te geven die in het geheugen zijn bewaard. Druk na het laatste testresultaat nogmaals op MAIN en het toestel wordt uitgeschakeld.



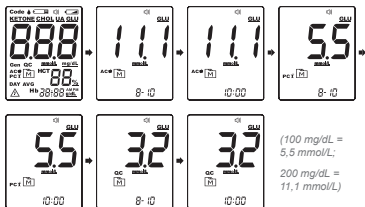

Ga als volgt te werk om de gemiddelde testresultaten van de dag te bekijken:

1. Druk op ▼ en laat los om de geheugenmodus te activeren

voor de gemiddelde resultaten met het pictogram "DAY AVG" op het scherm. Laat ENTER los en uw gemiddelde resultaat over 7 dagen, gemeten in de algemene modus, verschijnt op de weergave.

2. Druk op ▲ of ▼ om de in elke meetmodus bewaarde gemiddelde resultaten over 14, 21, 28, 60 en 90 weer te geven in de volgorde Gen, AC en dan PC.


Opmerking: • Houd MAIN 5 seconden ingedrukt om de geheugenmodus te verlaten of wacht 2 minuten zonder enige handeling uit te voeren om het geheugen te verlaten. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld. • Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, verschijnt het pictogram "—" wanneer u de testresultaten ophaalt of het gemiddelde resultaat bekijkt. Dit geeft aan dat het geheugen geen testresultaten bevat. • De resultaten van de controleoplossing zijn NIET opgenomen in het daggemiddelde.

Gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht via bluetooth

U kunt uw toestel gebruiken met een iOS (5.0.1 of hoger) Android systeem (4.3 API Level 18 of hoger) om via Bluetooth gegevens van uw FORA 6 Connect te downloaden. Volg de onderstaande stappen om gegevens van uw FORA 6 Connect over te dragen. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw plaatselijke klantendienst of verkoper.

1. Installeer de software (iFORA HM) op uw toestel met een iOS of Android systeem.
2. ETelkens als de FORA 6 Connect wordt uitgeschakeld, wordt de Bluetooth opgestart voor gegevensoverdracht. De Bluetooth-indicator knippert in het blauw.
3. Zorg dat uw FORA 6 Connect reeds gekoppeld is met uw toestel met een iOS, Android systeem of PC door de onderstaande aanwijzingen te volgen.

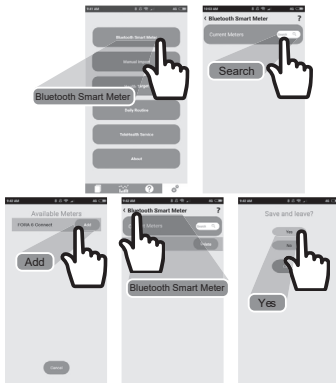

Opmerking: Deze step is raadzaam wanneer de gebruiker de meter voor de eerste keer moet koppelen aan een Bluetoothontvanger of wanneer de gebruiker de meter moet koppelen aan een nieuwe Bluetooth-ontvanger.

4. Als uw toestel met een iOS, Android systeem of PC zich binnen het ontvangstbereik bevindt, wordt de gegevensoverdracht gestart en wordt de Bluetooth in het blauw aangegeven. Wanneer de overdracht voltooid is, wordt de FORA 6 Connect automatisch uitgeschakeld.

5. Als uw toestel met een iOS, Android systeem of PC zich niet binnen het ontvangstbereik bevindt, wordt de FORA 6 Connect na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: • Terwijl de weegschaal zich in overdrachtsmodus bevindt, is het niet mogelijk om een bloedglucosetest uit te voeren. • Zorg dat de Bluetooth van uw toestel met iOS (5.0.1 of hoger) of Android systeem is geactiveerd voordat u de gegevens overdraagt en dat de meter zich binnen het ontvangstbereik bevindt.

Onderhoud

De batterij vervangen

Vervang de batterij onmiddellijk en stel de datum en het uur opnieuw in als de batterij nagenoeg leeg is en het symbool "E-b" en "E-b" op het scherm verschijnt. Zo niet, kan de meter kan worden aangezet.

Ga als volgt te werk om de batterij te vervangen:

1. Druk op de rand van het batterijdeksel en neem het weg.
2. Verwijder de oude batterij en vervang door een nieuwe 1,5 V AAA alkalinebatterij.
3. Sluit het batterijdeksel. Als de batterij juist is geplaatst, hoort u vervolgens een biepton.



VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ NIET VAN HET JUISTE TYPE IS. DANK GEBRUIKTE BATTERIJEN AF IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORSCHRIFTEN.

Opmerking: • Door de batterijen te vervangen gaan de in het geheugen bewaarde meetresultaten niet verloren. • Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts. • Batterijen kunnen chemische stoffen lekken als ze langdurig niet worden gebruikt. Verwijder de batterijen als u het toestel lang niet gaat gebruiken. • Dank de oude batterijen naar behoren af in overeenstemming met uw plaatselijke milieuvorschriften.

Zorg dragen voor uw toestel

• Veeg de buitenkant van het toestel met een licht vochtige doek met water of een mild schoonmaakmiddel schoon en droog af met een zachte, droge doek. NIET spoelen met water. • Gebruik GEEN organische oplosmiddelen om het toestel te reinigen.

Uw toestel opbergen

• Opbergvoorwaarden: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F), en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 93%. • Bewaar of vervoer uw toestel steeds in de oorspronkelijke verpakking. • Laat het niet vallen en vermijd stoten. • Vermijd rechtstreeks zonlicht en een hoge vochtigheidsgraad.

De meter afdanken

De meter moet worden behandeld als verontreinigd materiaal en kan een risico

van besmetting met zich meebrengen tijdens het meten. De batterijen moeten uit de gebruikte meter worden verwijderd en de meter moet worden afgedankt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Uw accessoires verzorgen

Voor het onderhoud van elk accessoire raadpleegt u de bijsluiters van de teststrip, controle-oplossing, prikinstrument en lancet.

Informatie symbolen

Symbool	Referentie	Symbool	Referentie
	Voor <i>in vitro</i> diagnostisch gebruik		Niet hergebruiken
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Temperatuurbepering bij opslag/transport
	Houdbaarheid		CE-markering
	Batchcode		Fabrikant
	Serienummer		Gooi de verpakking op juiste wijze weg na gebruik
	Importeur		Opgelet: raadpleeg begeleidende documenten
	Distributeur		Gesteriliseerd met gebruik van straling
	Modelnummer		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Verwijdering van afgedankte apparatuur		Vochtigheidsbeperking bij opslag/transport
1.5V	1,5 Volt DC		Unieke apparaatidentificatie

	Hoeveelheid		Batterij
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie		Sorteerinstructies




Probleemoplossing

Als u de aanbevolen stappen volgt, maar het probleem zich blijft voordoen, of als er andere foutberichten verschijnen dan hieronder aangegeven, gelieve dan contact op te nemen met uw plaatselijke klantendienst.




Probeer het toestel niet zelf te repareren en demonteer het toestel in geen enkel geval.

Afgelezen resultaten



Bloedglucosetest:

Bericht	Betekenis
	< 10 mg/dL (0,5 mmol/L)
	≥ 240 mg/dL (13,3 mmol/L)
	> 600 mg/dL (33,3 mmol/L)



Bloedglucose-/Hematocriet-/Hemoglobinetest:

Bericht	Betekenis
	< 10 mg/dL (0,5 mmol/L)
	≥ 240 mg/dL (13,3 mmol/L)
	> 600 mg/dL (33,3 mmol/L)



β-ketontest:

Bericht	Betekenis
	< 0,1 mmol/L
	> 8,0 mmol/L



Totale cholesteroltest:

Bericht	Betekenis
	< 100 mg/dL (2,65 mmol/L)
	> 400 mg/dL (10,4 mmol/L)

Urinezuurtest:

Bericht	Betekenis
	< 3 mg/dL (0,179 mmol/L)
	> 20 mg/dL (1,190 mmol/L)

Fehlermelding

Foutbericht	Oorzaak	Handeling
E-b	De batterijen voorzien niet genoeg vermogen voor een test.	Vervang de batterijen onmiddellijk op en stel de datum en het uur van de meter opnieuw in.
	De strip werd reeds gebruikt.	Herhaal de test met een nieuwe strip.
E-U	Het bloedmonster werd aangebracht op de strip voordat de meter klaar was voor de meting.	Herhaal de test met een nieuwe strip. Breng het bloedmonster aan wanneer de meter aangeeft dat hij klaar is voor de meting door een "  " en een "  " die begint te knippen weer te geven.

E-E	Fout ijkingsgegevens meter.	
E-0	De component van het toestel kan stuk zijn.	Lees de aanwijzingen en herhaal de test met een nieuwe strip. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw plaatselijke klantendienst voor bijstand.
E-R	Storing van de meter naar aanleiding van beschadigde componenten.	
E-C	Onjuiste gegevens op de meter of de codestrip.	
E-F	U hebt de strip mogelijk verwijderd na het aanbrengen van het bloed, of het bloedvolume is onvoldoende.	
E-t	De omgevingstemperatuur is lager dan het bedrijfsbereik van het systeem.	Het bedrijfsbereik van het systeem is 8°C tot 45°C (46,4°F tot 113°F). Herhaal de test nadat het toestel en de teststrip de bovenstaande temperatuur hebben bereikt.
	De omgevingstemperatuur is hoger dan het	
E-2	Verschoont wanneer de teststrips vervallen zijn. (voor β -keton-/ totale cholesterol-/ urinezuurtest)	Zorg dat de datum en het uur van de meter correct zijn ingesteld en geactualiseerd zijn. Breng de codestrip opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan de vervaldatum van de teststrip. Gooi vervallen teststrips weg. Gebruik een nieuwe teststrip die nog niet is vervallen en herhaal de test.

De test start niet nadat het monster is aangebracht.	Onvoldoende bloedmonster.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip een groter volume bloedmonster.
	Teststrip defect.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
	Monster aangebracht nadat het toestel automatisch werd uitgeschakeld.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Breng het monster enkel aan wanneer "🔥" knippert op de weergave.
	Toestel defect.	Gelieve contact op te nemen met de klantendienst.
Het testresultaat van de controleoplossing is buiten bereik.	Fout bij het uitvoeren van de test.	Lees de aanwijzingen grondig en herhaal de test.
	Foel van de controleoplossing niet goed geschud.	Schud de controleoplossing goed en herhaal de test.
	Vervallen of verontreinigde controleoplossing.	Controleer de vervaldatum van de controleoplossing.
	Controleoplossing te warm of te koud.	De controleoplossing, het toestel en de teststrips moeten op kamertemperatuur zijn (20°C tot 25°C / 68°F tot 77°F) vóór het testen.
	Teststrip defect.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
	Storing van het toestel.	Gelieve contact op te nemen met de klantendienst.

Bloedglucosemeting

Symptoom	Oorzaak	Handeling
Het toestel geeft geen bericht weer nadat u een teststrip hebt ingebracht.	Batterijen leeg.	Vervang de batterij onmiddellijk.
	Teststrip ondersteboven of onvoldedig ingebracht.	Breng de teststrip met het uiteinde van de contactstaafjes eerst en naar boven in.
	Toestel of teststrips defect.	Gelieve contact op te nemen met de klantendienst.

Specificaties

Geheugen	1000 meetresultaten
Afmetingen	89,8 (L) x 54,9 (W) x 18 (H) mm
Power Source	Eén 1,5V AAA alkalinebatterij
Gewicht	46,1 g (zonder batterij)
Externe uitgang	Bluetooth
Eigenschappen	Automatische detectie inbrengen elektrode Automatische detectie plaatsing monster Automatische aftelling reactietijd Automatische uitschakeling na 2 minuten zonder gebruik Temperatuurmelding

Bedrijfsvoorwaarden	8°C tot 45°C (46,4°F tot 113°F), minder dan 85% R.H. (anti-condensering)
Bewaar-/vervoersvoorwaarden	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F), 10% tot 93% R.H
Meeteenheden	Bloedglucosetest: mg/dL of mmol/L Hematocriettest: % Hemoglobinetest: g/dL β-ketontest: mmol/L Totale cholesterolttest: mg/dL Urinezuurtest: mg/dL
Meetbereik	Bloedglucosetest: 10 ~ 600 mg/dL (0,55 ~ 33,3 mmol/L) Hematocriettest: 0 ~ 70% Hemoglobinetest: 0 ~ 23,8 g/dL β-ketontest: 0,1 ~ 8,0 mmol/L Totale cholesterolttest: 100 ~ 400 mg/dL (2,6 ~ 10,4 mmol/L) Urinezuurtest: 3 ~ 20 mg/dL (0,179 ~ 1,190 mmol/L)
Hematocrietbereik	Bloedglucosetest: 0 ~ 70% Bloedglucose-/Hematocriet-/Hemoglobinetest: 0 ~ 70% β-ketontest: 10 ~ 70% Urinezuurtest: 20 ~ 60% Totale cholesterolttest: 20 ~ 60%
Testmonster	Bloedglucosetest: Capillaire/ Veneuze/ Neonatale/ Arteriale Bloedglucose-/Hematocriet-/ Hemoglobinetest: Capillaire/ Veneuze/ Neonatale/ Arteriale β-ketontest: Capillaire/ Veneuze Urinezuurtest: Capillaire Totale cholesterolttest: Capillaire
Testresultaat	Metingen worden gemeld als plasmaequivalenten

Dit toestel werd getest om te voldoen aan de elektriciteitsveiligheidsvereisten van: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-, IEC/EN 61326-2-6, EN 301 489-17, EN 300 328.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Wat betreft de wegwerpproducten geeft ForaCare Suisse de oorspronkelijke koper de garantie dat elk door ForaCare Suisse vervaardigd standaard product op het ogenblik van levering vrij is van fabricage- en materiaalfouten en dat het bij gebruik voor de bedoelde doeleinden en in overeenstemming met de aanwijzingen op de etiketten geschikt is voor de doeleinden en aanwijzingen op de etiketten. Alle productgaranties vervallen op de vervaldatum van het product of, bij gebrek hieraan, vijf (5) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop, op voorwaarde dat het product niet werd gewijzigd, veranderd of foutief gebruikt. De onderhavige garantie van ForaCare Suisse is niet van toepassing als:

(i) een product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen ervan of als het wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan aangegeven op de etiketten; (ii) de koper of anderen reparaties, wijzigingen of andere werkzaamheden hebben uitgevoerd aan het artikel, buiten de werkzaamheden waarvoor ForaCare Suisse toestemming heeft gegeven en in overeenstemming met de goedgekeurde procedures; of (iii) het vermeende defect het resultaat is van fout gebruik, misbruik, ongeschikt onderhoud, ongeval of nalatigheid van enige andere partij dan ForaCare Suisse. De hierin bepaalde garantie is enkel van toepassing als de voorwaarden op het gebied van bewaring, installatie, gebruik en onderhoud zijn nageleefd in overeenstemming met de toepasselijke schriftelijke aanbevelingen van ForaCare Suisse.

De onderhavige garantie is niet van toepassing op beschadigde artikelen deels of geheel naar aanleiding van het gebruik van componenten, accessoires, onderdelen of artikelen die niet werden geleverd door ForaCare Suisse.

FORA® 6 Connect

EC REP **MedNet EC-REP GmbH**

Borkstraße 10, 48163 Münster,
Germany



ForaCare Suisse AG

Neugasse 55, 9000 St. Gallen,
Switzerland
www.foracare.ch



Smart OTC GmbH

Markircher Straße 9A,
68229 Mannheim,
Deutschland



TEL: +49 (0) 62176021410
FAX: +49 (0) 62176021444
www.foracare.de

For self-testing / Für Selbsttests /
Pour auto-mesure / Per automisurazione /
Voor zelftests / Za samostalno mjerenje /
За самотестване / Til sjálfsprófunar

