


User`s Manual

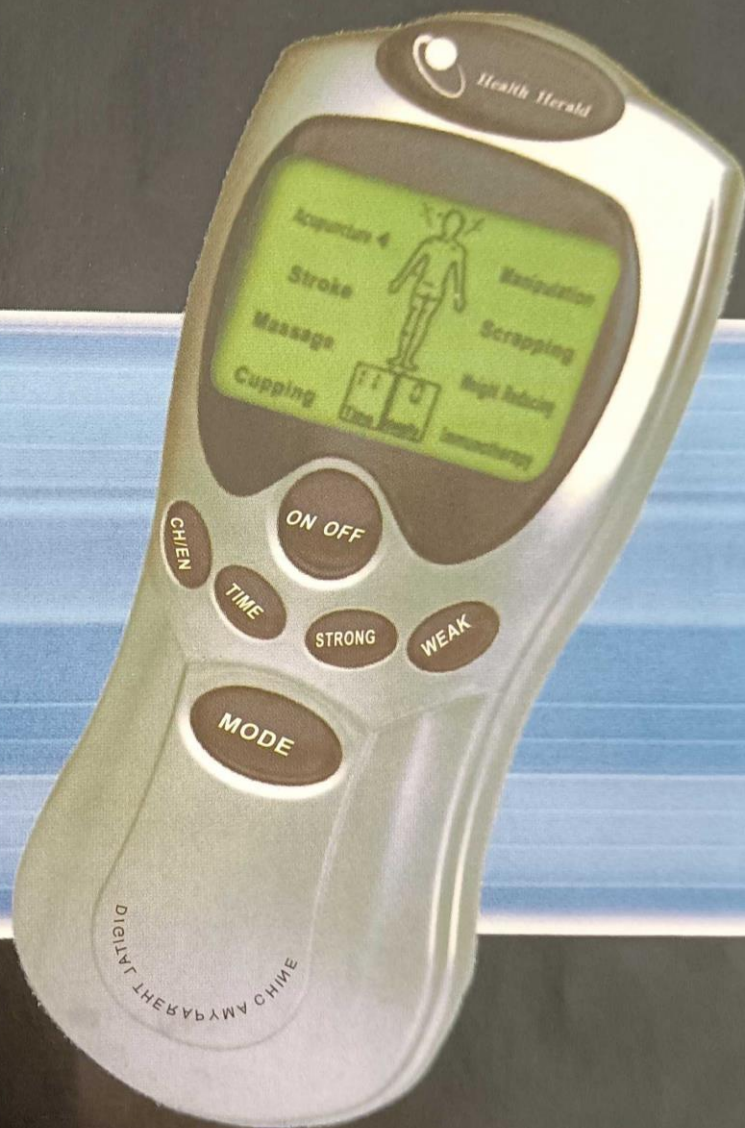

- Stroke
- Massage
- Acupuncture
- Manipulation
- Scraping
- Cupping
- Weight Reducing
- Hypnogenesis

HEALTH HERALD TENSAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing

Digitale Therapie Machine

Moderne wetenschap en technologie gecombineerd met de Chinese geneeskunde

QQP

Nederlandse vertaling

Dit product is geen medisch hulpmiddel

Veiligheidsvoorschriften:

Gebruik dit product niet samen met de volgende medische elektronische apparaten:

1. Gebruik van pacemakers en inplantbare medische elektronische apparaten;
2. Gebruik van kunstmatige cardiopulmonaire pacemakers en levensverlengende medische apparaten;
3. Gebruik van ECG-apparaten en het dragen van medische elektronische apparaten;
4. De plaatsing van de massagepatch moet vermeden worden vanuit het hart en de borstkas van het menselijk lichaam. Geen elektrische pulsen die het hart ongemak veroorzaken;
5. Huidirritaties en etterende ontstekingen; gebruik met voorzichtigheid. Wanneer u een massage krijgt van één van de bovengenoemde, moet de massagepatch de wond vermijden, en niet de wond irriteren of verergeren;
6. Voor jonge patiënten (kinderen) en kinderen zonder onafhankelijke bekwaamheid worden niet aanbevolen. Patiënten met hartziekten, diabetes en levercirrose mogen niet worden toegestaan.
7. Voor patiënten met geïmplanteerde metalen apparaten is het gebruik verboden; Als de bovengenoemde medische elektronische apparaten tegelijkertijd worden gebruikt, kan dit gevaarlijk zijn door een verkeerde bediening.

Gebruik voorzichtig in de volgende gevallen:

1. Kwaadaardige tumoren;
2. Infectieziekten;
3. Menstruerende en zwangere vrouwen;
4. Een hartaanval (mag niet dicht bij het hart geplaatst worden);
5. Koorts boven de 38 graden;
6. Abnormale huidgevoeligheid;
7. Niet op de volgende delen van het lichaam: mond, ogen, perineum, huidtrauma. **Doe dit dus niet**
8. Gebruik dit niet samen met andere massageapparaten of soortgelijke instrumenten of toepassingen van medicijnen;
9. Gebruik dit product niet op een lege maag;
10. Wees alstublieft voorzichtig wanneer u zich ongemakkelijk of duizelig voelt. Dit product behoort tot massagetoestellen, niet tot medische hulpmiddelen voor massage.

Functionele kenmerken

- 1) De machine zorgt voor een goede nauwkeurigheid van de massage, wat de effectiviteit ervan aanzienlijk verbetert.
- 2) Een groot LED-scherm, die sterkte, functie, modus, massage, Chinese en Engelse weergavesysteem, meridiaankaart en diagram van het menselijk lichaam toont.
- 3) De massagepleisters kunnen een groot gebied bedekken.
- 4) De machine biedt verschillende massagefuncties; zoals het verhogen en coördineren van lichaamsweerstand, effectief vertragen van lichaamsspijnen en pijn veroorzaakt door verschillende externe factoren.
- 5) Simulatie van golfvormcombinaties, zodat je echt de simulatie van acupunctuur, kloppen, de werkelijke gevoel van strijken, massage, cupping, massage en schrapen kunt ervaren.
- 6) Bied een LED-meridiaankaart voor de massage. Check de meridiaankaartgids, selecteer de pijnlijke en oncomfortabele delen van je lichaam en leer waar je de patches het beste kunt plakken.

Productkenmerken

Dit product gebruikt de high-tech computer digitale technologie, de nabootsing van hand - zoals massagebewegingen, integratie van geavanceerde ergonomische theorie, vergelijkbaar met een echte menselijke massage. Verminder vermoeidheid, versnel de bloedsomloop, verlicht stijfheid en verminder druk van werk. Breng je goede humeur terug met een korte, makkelijke massage.

Dit apparaatje is prachtig en compact, licht, en kan gebruikt worden in een warme familiesfeer. Het is te gebruiken in auto's en kantoren, één tot drie keer per dag, vijf tot vijftien minuten voor alle soorten spierpijn, rugpijn, schouderpijn, nekpijn, beenpijn, etc. Het simuleert handmassage, herleef spieren snel en verjongt.

Productspecificatie:

- voeding: drie DC 4.5V droge batterijen
- frequentie: 1 - 330Hz
- vermogen: 17mA (bij een weerstandsbelasting = 1KΩ)
- gastheergrootte: 1,5cm * 7,0cm * 2,8cm
- gewicht: 90g


Instructies voor

1. Open het batterijdeksel, plaats 3 batterij goed om erin en sluit de deksel.
2. Steek de 2 patchkabels in de uitgangsoening aan de bovenkant van het product en verbind deze vervolgens met de patches.
3. Begin met het gebruik van het product.
4. Dit product heeft twee stroomvoorzieningsmodi: stroomadapter en batterij.
5. Ontkoppel de stroombron wanneer niet in gebruik.
6. USB-kabel kan ook direct op de computer worden aangesloten voor gebruik.

De toets die


1. Aansluiting voor patchkabel: verbind massagepatch.
2. LCD-scherm: intuïtieve synchrone weergave van de machinestatus.
3. Aan/uit-toets: aan/uit-functie van de machine.
4. Weergavetoets: selecteer LCD-weergave in Chinees/Engels.
5. Functiekeuzetoets: de machine heeft acht massagefuncties.
6. Timingstoets: hiermee kunt u de tijd instellen.
7. Intensiteit verhoogtoets: verhoog de massage-intensiteit. Iedere keer als je op de knop drukt, gaat de timer met 5 minuten omhoog. Het kan maximaal op 15 minuten gezet worden.
8. Intensiteit verlaagtoets: verlaag de massage-intensiteit. Iedere keer als je op de knop drukt, verlaagt de kracht van het apparaat. De minimum stand is 0.

Product diagram

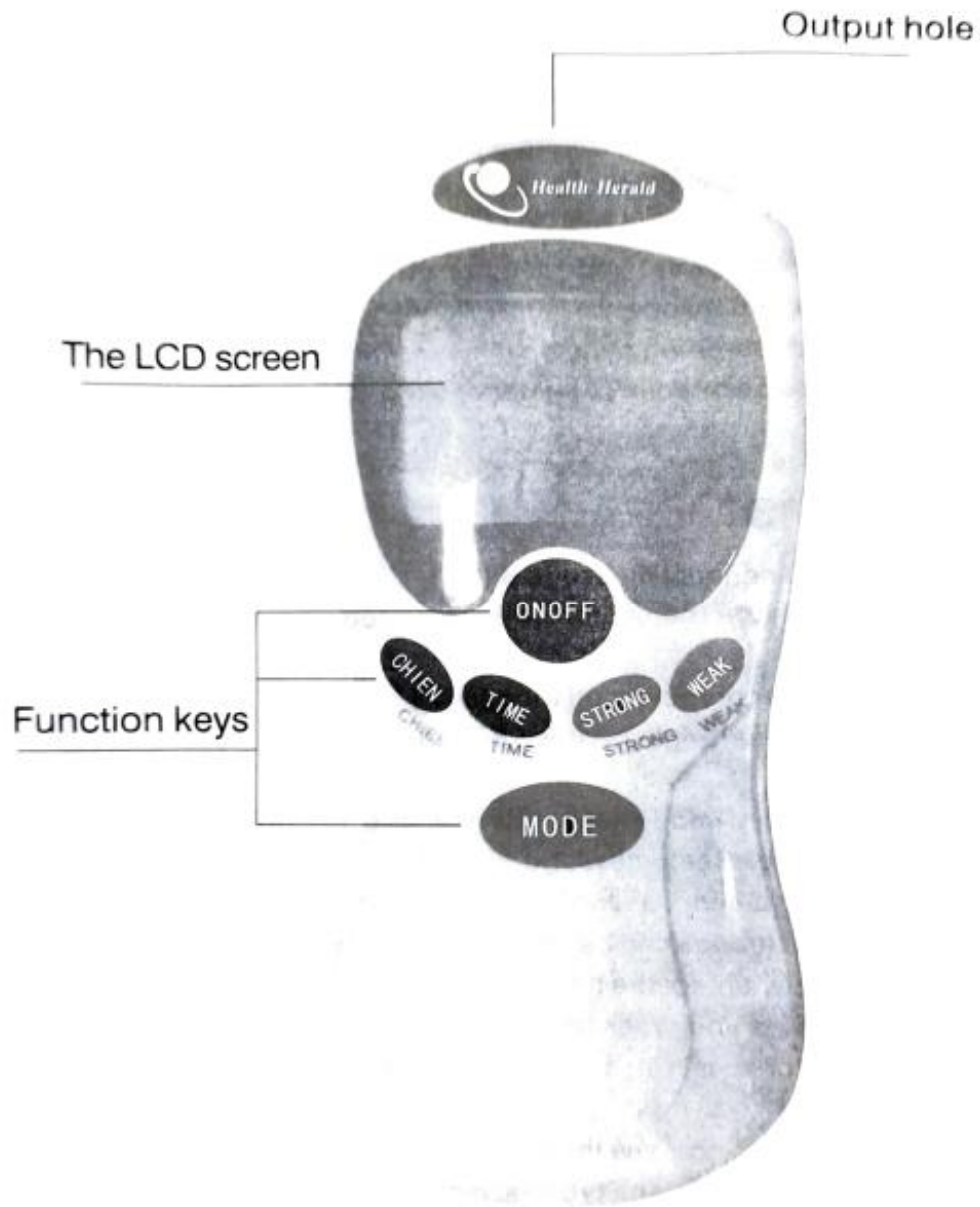


Het schematische diagram van massagepunten

1.

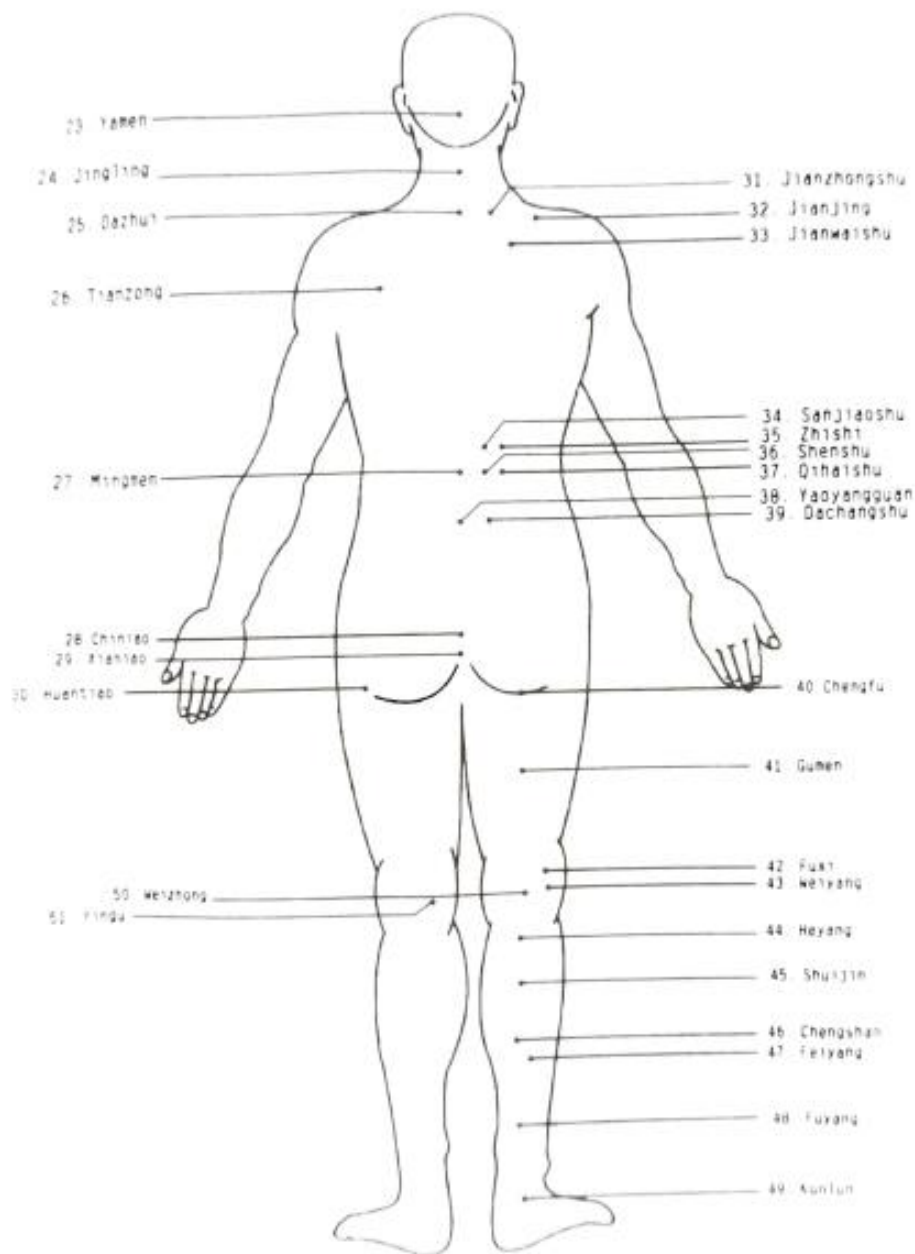


Het schematische diagram van massagepunten

2.

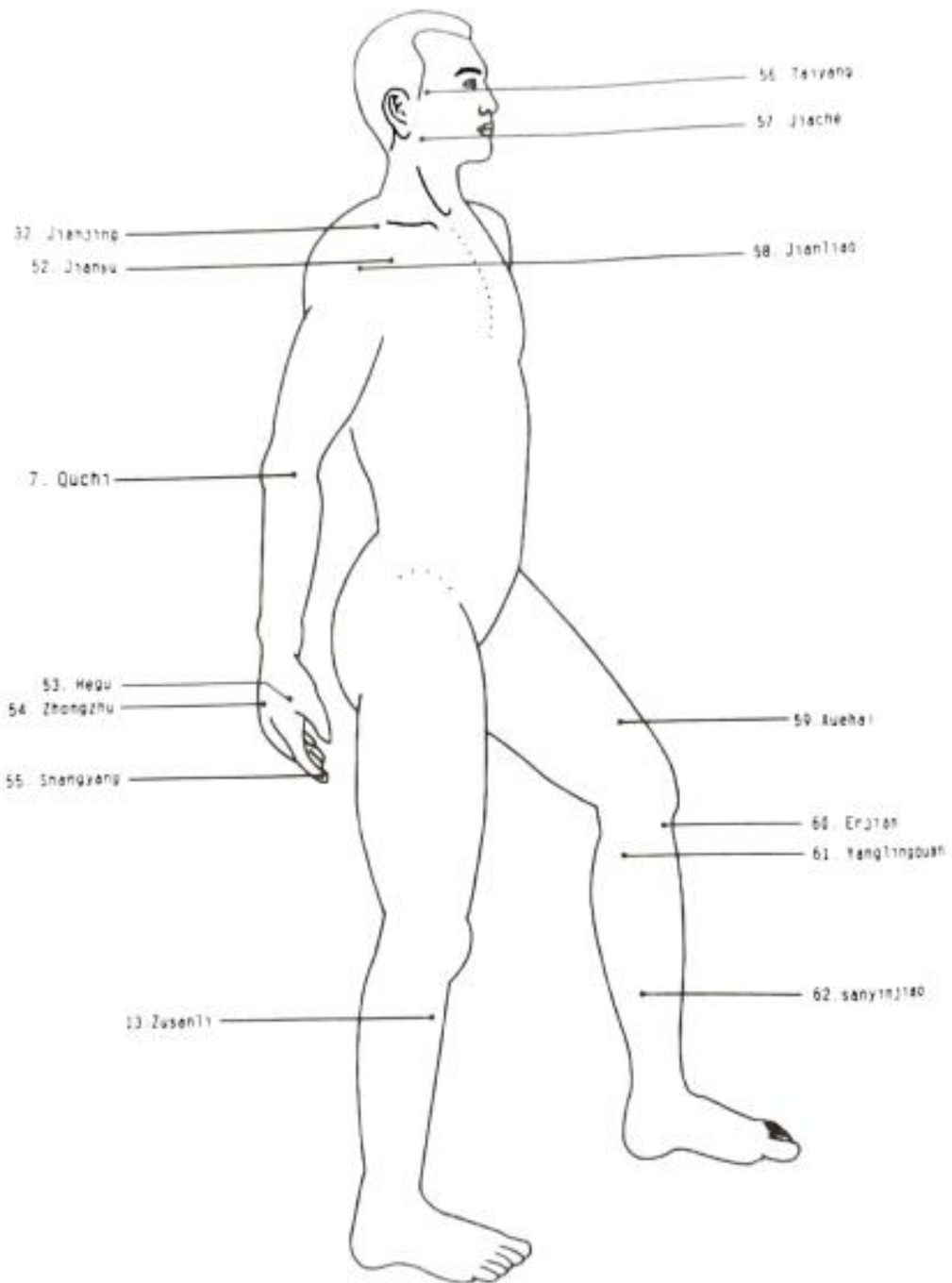


Het schematische diagram van massagepunten

3.

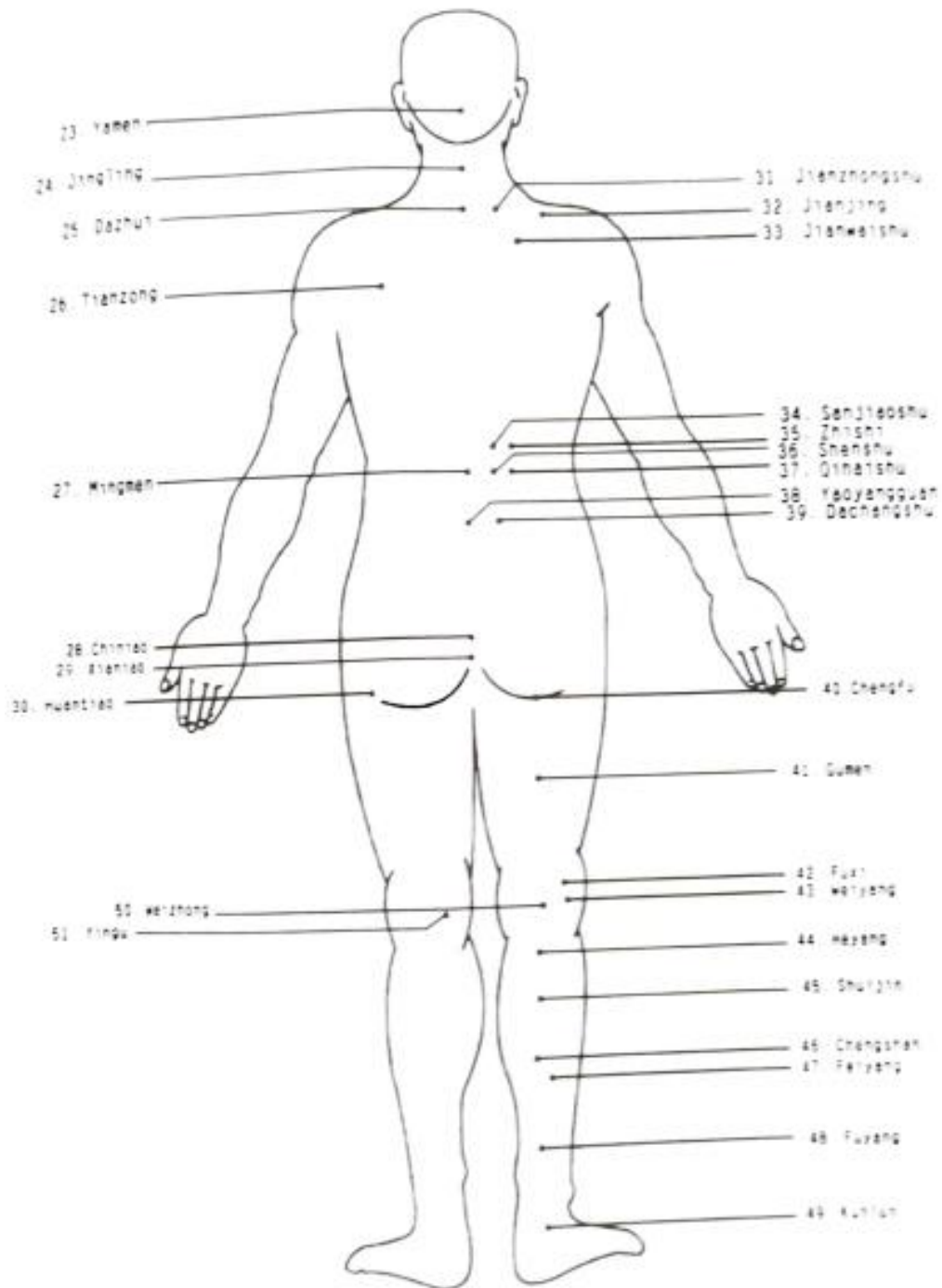

Het schematische diagram van massagepunten

4.

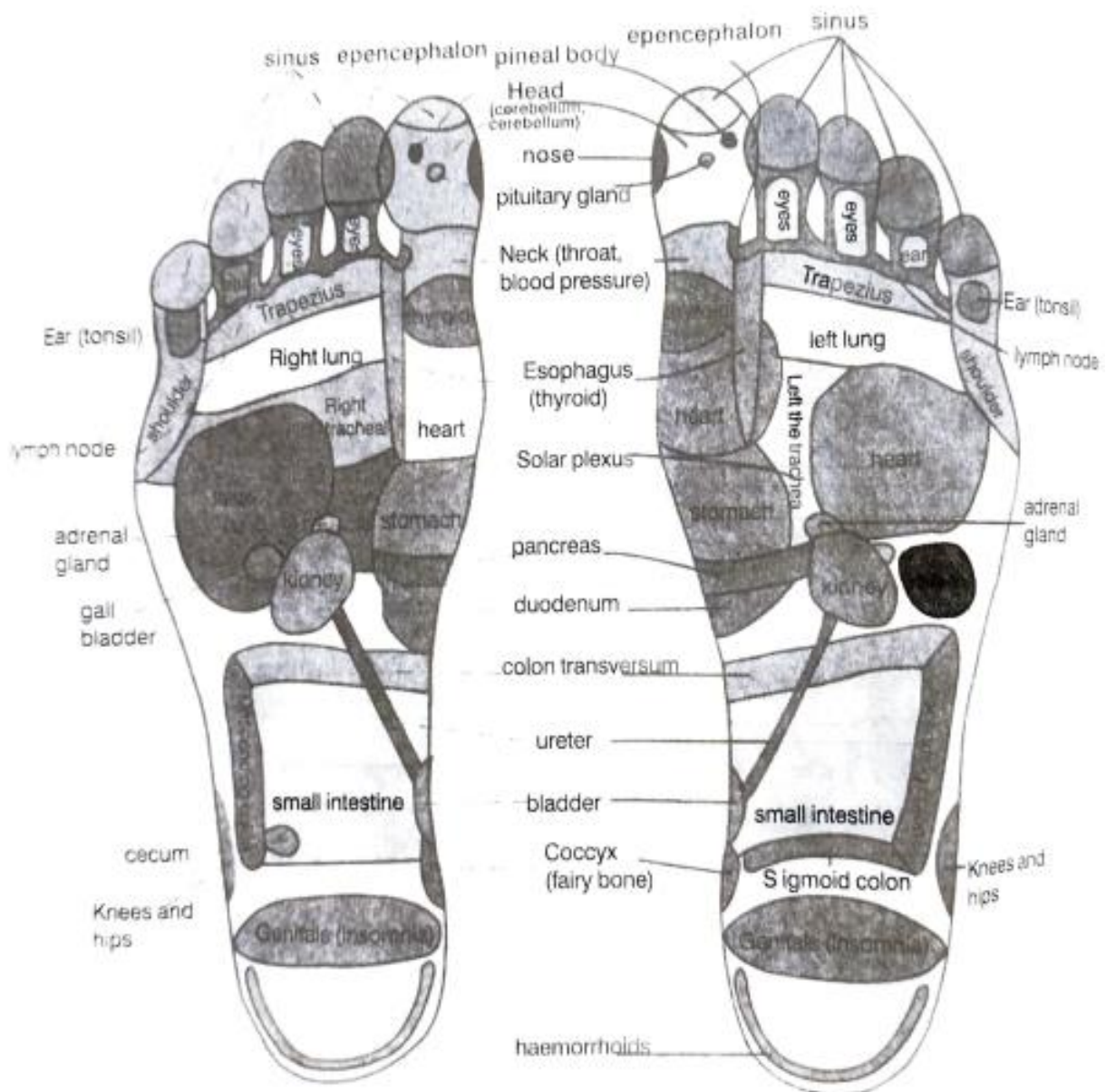

Service na verkoop en garantie

Garantie en principes

1. Als er een prestatieprobleem optreedt sinds de datum van verkoop, raadpleeg dan de aankoopafdeling;
2. De batterij en massagepatch zijn willekeurige verbruiksartikelen. Er komen geen batterijen bij de aankoop van dit product. Verder komen er 4 zakjes met patches bijgeleverd. Deze zijn te hergebruiken en kunnen dus niet los bijbesteld worden.
3. Zorg voor onderhoudsdiensten. Raadpleeg het aankoopkantoor voor details van onderhoudskosten:
 - A. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, opslag en onderhoud van de klant;
 - B. Schade veroorzaakt door de afbraak die niet wordt ondernomen door reparateurs;
 - C. Geen certificaat is verstrekt om te bewijzen dat het product is gekocht via formele kanalen, en het aankoopkantoor kan bewijs leveren;
 - D. Schade veroorzaakt door overmacht.

Voorbereiding voor gebruik

1. Open voorzichtig de batterijklep;
2. Stop er drie no.7 batterijen in, en let op de posities van de positieve en negatieve elektroden;
3. Sluit het deksel van de doos;

Vorbereiden van de massagepatches

- 1) Reinig het gebied dat gemasseerd moet worden om olievlekken en vlekken op het huidoppervlak te verwijderen;
- 2) Haal voorzichtig het beschermende laagje van de massagepatch af;
- 3) LET OP! Bewaar het beschermende laagje om na gebruik de patch er weer op te plakken voor hergebruik.

Massagepositie

- 1) Droog het te masseren gebied met een natte handdoek om vet en vlekken te verwijderen
- 2) Breng de massagepatch aan op het deel dat massage vereist
- 3) Twee paar massagepatches moeten tegelijkertijd aan het massagegebied worden bevestigd, anders kan de massage niet worden uitgevoerd.

Massagepatches hoeven niet symmetrisch te worden geplaatst!

Productonderhoud en opslagmethode

- 1) Reinig het apparaat: veeg het af met een zachte doek, maak de hoofdmotor niet nat, gebruik geen natte wollen doek. Veeg het apparaat om waterinfiltratie te voorkomen, gebruik geen verdunningsmiddelen, benzine of andere vloeistoffen die makkelijk vlekken veroorzaken;
- 2) Reinig en masseer de patch: het vuil op de patch kan worden afgeveegd met een natte doek of worden gewassen met water. Was het onmiddellijk na het drogen zodat het opnieuw gebruikt kan worden;
- 3) Opslag: plaats het massageapparaat buiten bereik van kinderen. Bewaar het weg van vochtigheid, hoge temperatuur en direct zonlicht.
- 4) Het product is uitgerust met eenvoudige anti-trillingsfaciliteiten, geschikt voor lucht-, spoorweg-, snelweg- en slooptransport. Regen en sneeuwspatten, omkeren en botsing moeten worden vermeden.

Probleemoplossing

Storingstoestand	Waarom	Wat te doen
De batterij laden, LCD werkt niet	Of er is een vreemd voorwerp in het batterijvak is, of de batterij is leeg/ is verkeerd om geïnstalleerd. De batterij kan ook slecht contact maken.	Controleren en schoonmaken, vervangen of de batterij correct plaatsen
Vloeibaar kristal van lage batterij licht op, maar knippert niet	Het is niet defect	Verwijder de batterij gedurende 4 seconden
Het vloeibare kristal is normaal, geen sensatie	De stekker is niet correct in het gat gestoken	Juiste stekker
De stimulatie wordt zwak of het verdovende gevoel	Of de massagepatch in normaal contact is met de huid, wanneer de massagepatch correct contact maakt met de huid	Steek de kabel steviger vast en masseer de patch, plaats de massagepatch stevig op de huid
De massage-uitgang is gestopt wanneer de modus wordt gebruikt	Het massageoppervlak is vuil	Reinig of vervang massagepatches
De huid wordt rood, jeukerig of kriebelig na de massage	Of het lichaamsoppervlak is vettig, de batterij leeg is, of de huid is gevoelig voor de massagepatches	Reinig het oppervlak, vervang de batterij