

Aanbrengen en verwijderen van de Depend For Men Shields

Let op: het Depend For Men Shields-inlegverband is niet te gebruiken in een los vallende boxershorts. Draag een aansluitende slip of strakke boxer.



Stap 1: Haal het verband uit de verpakking.

Stap 2: Zorg dat de brede kant zich aan de voorzijde bevindt.

Stap 3: Plaats het verband met de brede kant boven en de plakstrip naar beneden, redelijk hoog in de voorzijde van een nauwsluitende, elastische boxershorts of strakke slip (zie afbeelding).

Druk het verband goed aan, zodat het verband niet kan omvouwen en/of verschuiven. Trek het ondergoed goed omhoog en zorg dat het verband voor de penis zit. Let op: het Depend For Men Shields-inlegverband is niet te gebruiken in een los vallende boxershorts.

Na gebruik: Verwijder de Shields eenvoudig door het voorzichtig uit uw ondergoed te trekken en gooi het bij het restafval in de prullenbak. Het verband is niet doorspoelbaar.

Tips:

Om te zorgen dat de Shields goed blijft zitten en u onbeperkte bewegingsvrijheid heeft, blijven onze plakstrips goed plakken. Hierdoor kan het zijn dat uw inlegverband moeilijk uit dun ondergoed te verwijderen is. Heeft u hier last van? Plak het inlegverband voordat u het in uw ondergoed plakt, eerst op bijvoorbeeld uw jeans of een theedoek en vervolgens pas in uw ondergoed. Door het stof verliest de plakstrip iets aan plakkracht.

Gebruik voor het weggooien van uw gebruikte Shields geparfumeerde zakjes om vervelende geurtjes te voorkomen.



Depend® Guards en Shields zijn ontworpen om het onvrijwillige verlies van een kleine hoeveelheid urine op te vangen. Ze zijn ontworpen voor mannen die last hebben van lichte urine-incontinentie. Het product is ontworpen om op dezelfde manier aan de binnenkant van het ondergoed te worden bevestigd als een maandverband. Het product komt in direct contact met de huid van de gebruiker en is bedoeld voor eenmalig gebruik. De gebruiker kan het product voortdurend dragen.