

Aanbrengen en verwijderen van het inlegkruisje

Gebruik het inlegverband in een goed passende, aansluitende damesboxershorts of sliep, zodat het verband goed aansluit en op zijn plek blijft zitten.



Stap 1: Haal het verband uit de verpakking.

Stap 2: Verwijder de papieren beschermstrook aan de onderkant van het verband.

Stap 3: Plak het verband in een aansluitende, elastische damesboxershorts of sliep. Druk het verband goed aan, zodat het niet kan omvouwen of verschuiven. Trek het ondergoed omhoog en zorg voor een goede aansluiting in het kruis.

Na gebruik: Verwijder het materiaal eenvoudig door het voorzichtig uit uw ondergoed te trekken en gooi het bij het restafval in de prullenbak. Het verband is niet doorspoelbaar.



Depend®-inlegverbanden en inlegkruisjes zijn ontworpen voor vrouwen om het onvrijwillige verlies van een kleine hoeveelheid urine op te vangen. De meerderheid van de gebruikers zal lichamelijk actief zijn. De gebruikers hebben allemaal last van zeer lichte tot matige blaasincontinentie. Het product is ontworpen om de huid droog te houden, totdat het product dient te worden vervangen.