

Handleiding doppler



BY SENZARA

Gefeliciteerd met uw zwangerschap!



Deze unieke doppler is ontworpen om u als aanstaande ouders een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens uw zwangerschap. Met behulp van geavanceerde technologieën kan de doppler de hartslag van de baby nauwkeurig en duidelijk vastleggen,

Wat maakt deze doppler zo bijzonder?

Unieke ECG-functie: Deze doppler bevat ook een ECG-functie die het hartje van de baby kan meten en zo een compleet beeld geeft van de gezondheid van de baby.

Gemakkelijk in gebruik: Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het mogelijk voor elke ouder om de doppler te gebruiken en de hartslag van hun baby te vinden, zonder enige voorkennis of ervaring.

Heldere geluidskwaliteit: De doppler produceert een duidelijk en helder geluid van de hartslag van de baby, wat een onvergetelijk moment is voor elke ouder.

Veilig voor moeder en baby: De doppler maakt geen gebruik van schadelijke straling en is volkomen veilig voor zowel de moeder als de baby.

Draagbaar: Dankzij de lange batterijduur en het draagbare ontwerp kunt u de doppler overal mee naartoe nemen en op elk moment van de dag genieten van het horen van het hartje van uw baby.

Hoe gebruik je een doppler?

Een doppler gebruikt u eigenlijk vrij simpel:

- Ga rustig liggen, het is raadzaam om dit met een beetje volle blaas te doen.
- Schakel de doppler aan en kies het gewenste volume niveau.
- Nu gaat u met de probe op zoek naar de hartslag. Verplaats de probe dan ook heel langzaam over uw buik. Gebruik hiervoor de bijgeleverde ultrasound gel.
- Vraag bij een bezoek aan de verloskundige eventueel om tips waar op uw buik u het het beste kunt proberen, want het kan een behoorlijk zoekplaatje zijn. Het kan dus even duren voordat u de hartslag van uw baby hoort. Het is afhankelijk van de ligging van de baby hoe goed en hoe duidelijk de hartslag hoorbaar is.



Een handig overzicht

Hoe gebruik je het?

! Het kan een aantal pogingen kosten voordat je het hartje hoort. Dit komt doordat het kindje kan verliggen



12-24 weken
Onderbuik



24-32 weken
Onder en naast
de navel



32-40 weken
Rondom de
navel



30 minuten nadat
je wakke wordt



30 minuten na
het eten



30 minuten voordat
je gaat slapen

Hulp bij problemen



Geen geluid?

Volume is te laag/Power is laag. Zet de volumeknop harder/
vervang de batterijen, deze zouden leeg kunnen zijn

Slecht geluid?

Volume is te laag/Power is laag. Zet de volumeknop harder/
vervang de batterijen, deze zouden leeg kunnen zijn.

Ruis?

De probe is te dicht bij het apparaat/ U bent in een gebied
waar veel apparaten bij elkaar zijn/Power is laag. De probe
niet dicht bij het apparaat gebruiken, dit kan voor verstoring
zorgen.

Lage gevoeligheid? De positie van de probe is niet goed. Zorg
ervoor dat de probe op de juiste manier gebruikt wordt.



*Wij wensen u veel plezier toe met de doppler
en een voorspoedige zwangerschap!*

