

SHELLO III

Siliconen oordopjes met unieke membraantechnologie en ventielsysteem ; Ontworpen om uw oren te beschermen en tegelijkertijd de juiste balans van helderheid van het geluid te behouden. Geniet van concerten, clubs, festivals, raves of andere luide evenementen op een lager volume zonder op geluidskwaliteit in te leveren.

Oortjes in doen:

1. Zorg ervoor dat de oordopjes schoon zijn voordat u ze inbrengt.
2. Houd het uiteinde van de oordopjes tussen uw duim en wijsvinger.
3. Gebruik uw beschikbare hand om het inbrengen te vergemakkelijken. Trek de bovenkant van uw oor naar buiten en naar boven. Hierdoor wordt de gehoorgang recht zodat het oordopje gemakkelijk en effectief in het oor past.
4. Druk en draai het oordopje zachtjes tot het comfortabel in de gehoorgang zit. En de gehoorgang comfortabel afsluit. Steek het oordopje NIET te ver in uw oor en zorg ervoor dat het lipje van het oordopje voldoende uitsteekt, zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen na gebruik.
5. Gebruik bij het inbrengen uw duim en zet voldoende druk zodat het oordopje langzaam het oor in beweegt.

Oortjes uit doen:

1. Om te verwijderen pakt u voorzichtig het uiteinde van het oordopje met duim en wijsvinger en trek het oordopje langzaam uit het oor.
2. Het is raadzaam om de oordopjes na gebruik te reinigen met een vochtige doek voordat u ze in de beschermhoes opbergt.

Denk eraan! Dit mag geen pijnlijke procedure zijn.

Wees voorzichtig bij het inbrengen en verwijderen van de oordopjes en neem contact op met een arts als u medische problemen hebt met uw oren.

De doelmatigheid van de oordopjes hangt af van een aantal factoren, waaronder de grootte en vorm van de oren van de gebruiker en het geluidsniveau waarbij de oordopjes worden gebruikt.

Waarschuwing:

Buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden. Dit product is niet giftig, maar kan de ademhaling belemmeren als het in de luchtpijp terecht komt, of als het koord rond de nek wordt gewikkeld, dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Verkeerd gebruik of veronachtzaming van bovenstaande aanbeveling kan verminderd effectiviteit en kan leiden tot gehoorverlies of letsel. De oordopjes moeten worden gebruikt, afgeleid en onthouden volgens deze instructies;

De oordopjes moeten altijd worden gedragen in een veilige omgeving.

Deze oordopjes zijn gemarkeerd als herbruikbaar en moeten regelmatig op bruikbaarheid worden gecontroleerd. Als de bovenstaande aanbevelingen niet worden opgevolgd, wordt de bescherming die de oordopjes bieden ernstig aangetast. De oordopjes met snoer mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat het snoer tijdens het gebruik verstrikt raakt. De oordopjes kunnen worden aangetast door bepaalde chemische stoffen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de fabrikant.

Reiniging:

De oordopjes zijn herbruikbaar en moeten regelmatig op bruikbaarheid worden gecontroleerd. Bewaar de oordopjes na gebruik op een koude, droge plaats. Was de oordopjes met neutrale zeep en lauw water om ze te reinigen en te desinfecteren. Droog de oordopjes voordat u ze in het oor stopt. Gebruik de oordopjes tussen -20°C en 35°C. Laat de oordopjes nooit boven de 55°C komen. Stop met het dragen van de oordopjes als er tekenen van schade of slijtage zijn, vervang de beschadigde onderdelen om de levensduur van het product zo lang mogelijk te laten duren.

MINIMUM SOUND ATTENUATION > MINIMALE GELUIDDEMPING

SNR=23dB H=26dB M=19dB L=18dB

Sound attenuation

Frequency [Hz]	Sound attenuation [dB]	Standard deviation [dB]	APV [dB]
125	22.9	5.4	17.6
250	20.5	4.8	15.7
500	22.3	5.5	16.7
1000	24.0	5.1	18.9
2000	31.3	4.9	26.5
4000	36.1	5.4	30.7
8000	42.5	5.7	36.7



CE 2834

EN 352-2: 2002 (EU) 2016/425

Certificering Aangemelde Instantie:
CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate
Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1
Dublin
Ireland